

Natali behandlingsbenk

Art. nr: 1002283

Elektrisk massasjebenk med fire motorer som styrer benkens høyde, rygg, fotende og tilt. Benken har også en egen Reset-knapp. Benken har en ekstra myk polstring, LED-lys i base og integrert varme. I benkens base er det også lagringsplass.

Motorer: 4

Styres: Håndkontroll

Tilt: 10°

Lengde: 199,9 cm

Høyde: 66,5-86,5 cm

Bredde: 79 cm

Maksvekt: 175 kg

Materiale: PU



N.W: 131,6 kg

G.W: 187,6 kg

Emballasje: 206x86x69,5cm


Tillegg:

Fotkontroll

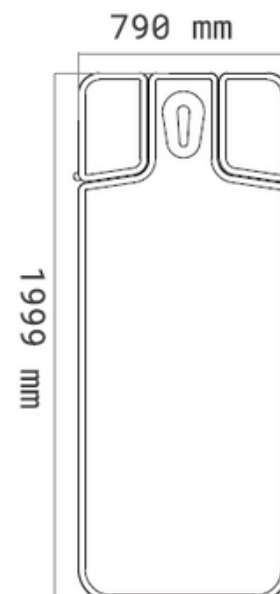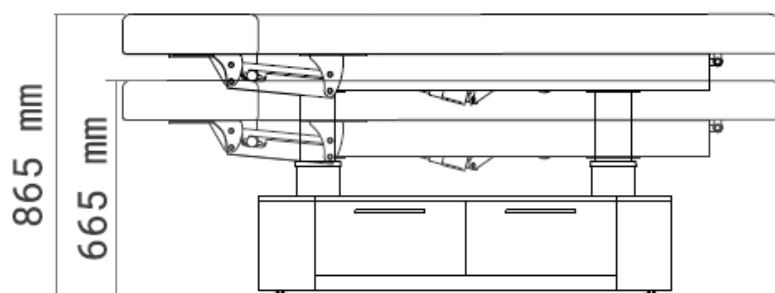

Natali behandlingsbenk

Art. nr: 1002283


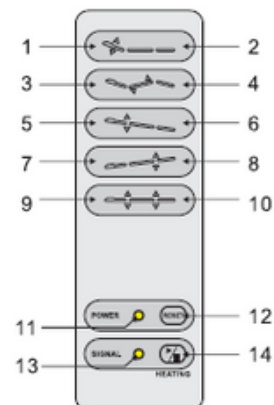


Standard konfigurasjon (Håndkontroll)

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtten beveges opp	Ryggstøtten beveger seg opp jevnt ved å trykke på knappen.
2.	Ryggstøtten beveges ned	Ryggstøtten beveger seg ned jevnt ved å trykke på knappen.
3.	Fotstøtten beveges opp	Trykk på knappen, fotstøtten vil bevege seg opp, vinkelen vil reduseres til minimum.
4.	Fotstøtten beveges ned	Trykk på knappen, fotstøtten vil bevege seg ned, vinkelen vil økes til maksimum.
5.	Motor for positiv vinkel på hele sengen beveges opp	Tilt på hele sengen øker jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
6.	Motor for positiv vinkel på hele sengen beveger seg ned	Tilt på hele sengen reduseres jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
7.	Motor for negativ vinkel på hele sengen beveges opp	Tilt på hele sengen øker jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
8.	Motor for negativ vinkel på hele sengen beveges ned	Tilt på hele sengen reduseres jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
9.	Beveges opp	Beveger seg opp jevnt ved å trykke på knappen.
10.	Beveges ned	Beveger seg ned jevnt ved å trykke på knappen.
11.	Strømindikator	Håndkontrolleren er koblet til strømforsyningen riktig, indikatorlyset er på. Ellers vil det ikke lyse.
12.	Enknapp nullstillingsknapp	Press knappen, ryggstøt vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, seteputevinkel vil automatisk reduseres til minimum, fotstøt vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, sengens høyde vil automatisk nå laveste posisjon.
13.	Indikatorlys for varmfunksjon	Ved å trykke på knappen, lyser det, varmfunksjonen fungerer; trykk på knappen igjen, lyset slukker, varmfunksjonen stopper.
14.	Oppvarming	


Natali behandlingsbenk

Art. nr: 1002283

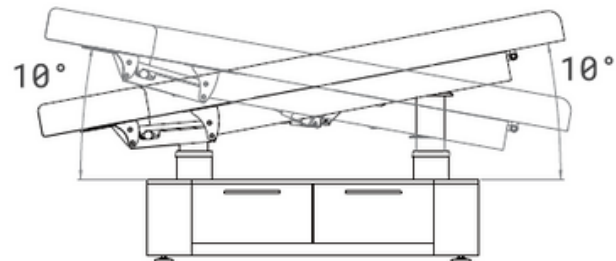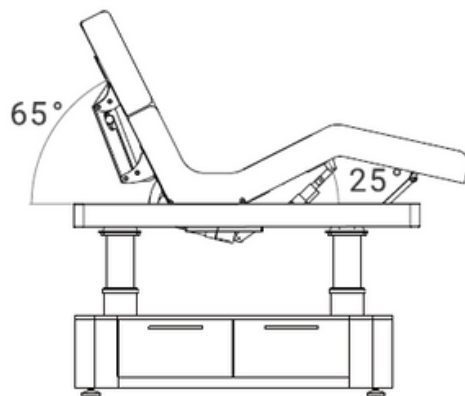

Tekniske parametere

Strøm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Omgivelsestemperatur	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	206x86x69,5cm

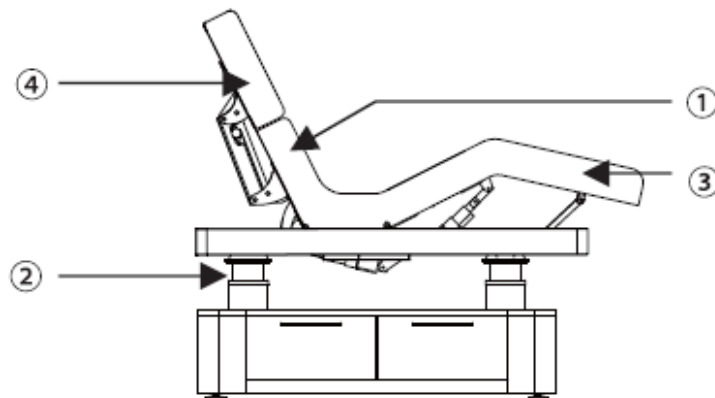

1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevingsjustering
3. Vinkeljustering av setet
4. Justering av armlener (manuell)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales **ikke**.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).