

Fabian

Art.nr: 1002249

Elektrisk behandlingsbenk med fire motorer som styrer benkens høyde, rygg, fotdel og tilt. Benken har en ekstra myk polstring, samt integrert varme. Foran på benken er det plassert armlener om kan brukes til kunden ved behandlinger når kunden ligger på magen, eller de kan settes opp for at behandleren kan få armstøtte til behandlinger som krever presisjonsarbeid.

Motorer: 4

Styres: Håndkontoll

Tilt: 10°

Bredde: 74 cm

Lengde: 198,5 cm

Høyde: 67- 87 cm

Maksvekt: 175 kg


N.W: 104kg

G.W: 124kg

Emballasje: 204x81x72cm



Tillegg:

Fotkontoll

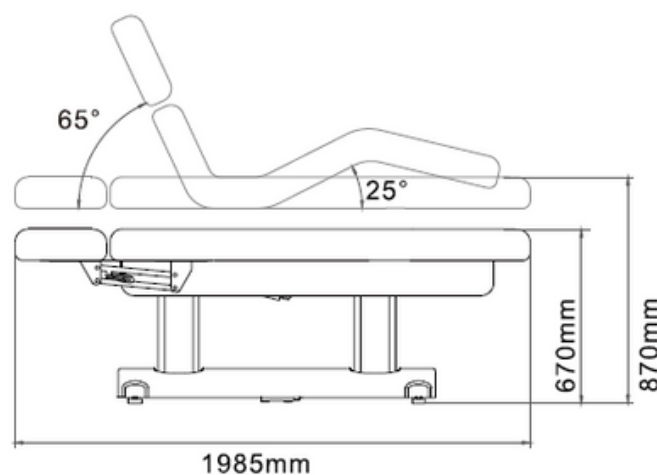

Fabian



Art.nr: 1002249

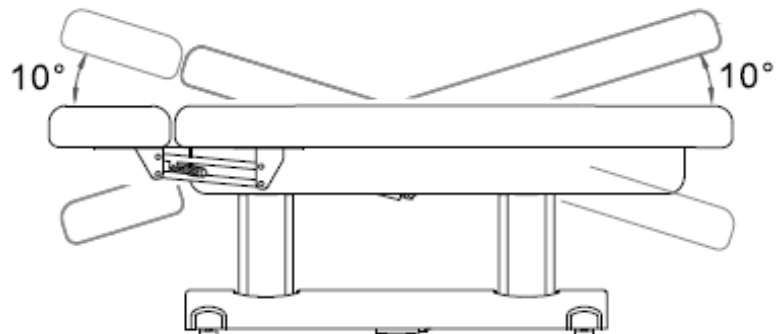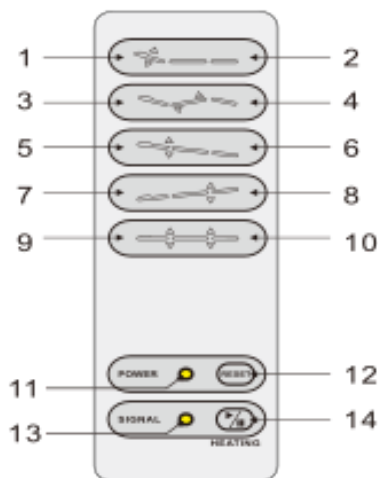

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtte beveger seg opp	Ryggstøtten går opp jevnt ved å trykke på knappen.
2.	Ryggstøtten senkes	Ryggstøtten går ned jevnt ved å trykke på knappen.
3.	Setepute bever seg opp	Fotstøtten vil bevege seg opp, og vinkelen vil bli redusert til maksimum.
4.	Setepute bever seg ned	Fotstøtten vil bevege seg ned, og vinkelen vil bevege seg til maksimum.
5.	Motor for positiv vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
6.	Motor for positiv vinkel på hele sengen går ned	Den skrå vinkelen på hele sengen reduseres jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
7.	Motor for negativ vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
8.	Motor for negativ vinkel på hele sengen går ned	Den skrå vinkelen på hele sengen reduseres jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
9.	Hele benken beveges opp	Benken går jevnt ned ved å trykke på knappen.
10.	Hele benken beveges ned	Benken går jevnt ned ved å trykke på knappen.
11.	Strømindikator	Håndkontrolleren er koblet til strømforsyningen på riktig måte, indikatorlampene lyser. Ellers vil den ikke lyse.
12.	Reset-knapp	Benken vil stilles tilbake til startposisjon.
13.	Indikator for varmfunksjon	Trykk på knappen, lyset er på, varmfunksjon fungerer; trykk på knappen igjen, lyset skruer seg av, varmfunksjonen skrus av.
14.	Varme	

Fabian

Art.nr: 1002249

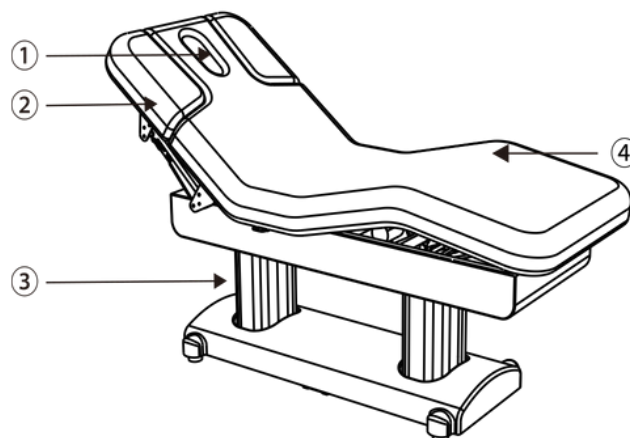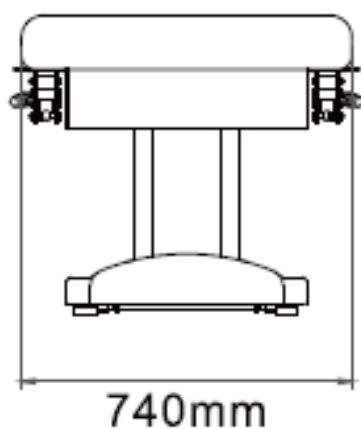

1. vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevjustering av armlenet (manuell)
3. Hevjustering av hele sengen
4. Vinkeljustering av fotstøtte

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	204x81x72kg

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).