

Olivia

Art.nr: 1002275

4 motors behandlingsbenk som justeres i høyde, rygg, tilt og fotstøtte. Benken har egen reset-knapp som justerer benkens motorer tilbake til startposisjon. Benken har en ekstra myk polstring, samt integrert varme. I boksen under massasjebenken er det integrert LED-lys. Justerbare armlener og hodestøtte med pustehull.

Motorer: 4

Styres: Håndkontroll

Lengde: 198,5 cm

Høyde: 67-87 cm

Bredde: 74 cm

Tilt: 10°

Maksvekt: 175 kg

Materiale: PU


N.W: 108,5 kg

G.W: 126 kg

Emballasje: 204x81x74 cm



Tillegg:

Fotkontroll

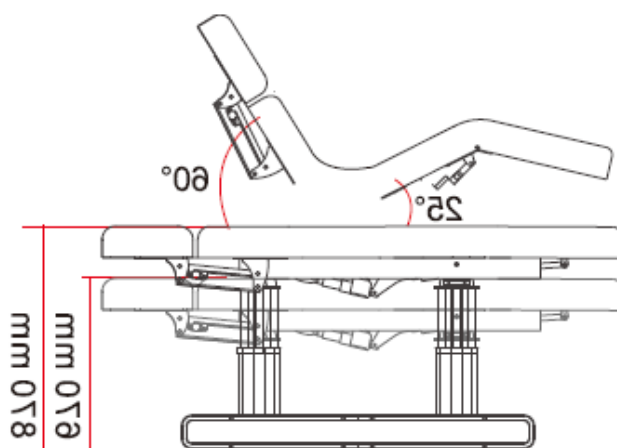

Olivia

Art.nr: 1002275

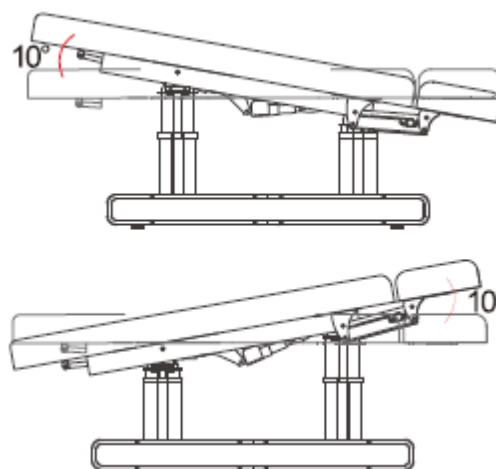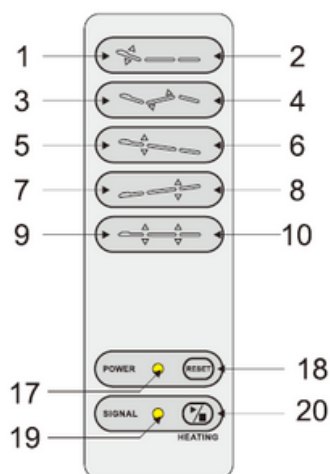


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtte beveger seg opp	Ryggstøtten går opp jevnt ved å trykke på knappen.
2.	Ryggstøtten senkes	Ryggstøtten går ned jevnt ved å trykke på knappen.
3.	Setepute bever seg opp	Fotstøtten vil bevege seg opp, og vinkelen vil bli redusert til maksimum.
4.	Setepute bever seg ned	Fotstøtten vil bevege seg ned, og vinkelen vil bevege seg til maksimum.
5.	Motor for positiv vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
6.	Motor for positiv vinkel på hele sengen går ned	Den skrå vinkelen på hele sengen reduseres jevnt i positiv retning ved å trykke på knappen.
7.	Motor for negativ vinkel på hele sengen går opp	Den skrå vinkelen på hele sengen øker jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
8.	Motor for negativ vinkel på hele sengen går ned	Den skrå vinkelen på hele sengen reduseres jevnt i negativ retning ved å trykke på knappen.
9.	Hele benken beveges opp	Benken går jevnt ned ved å trykke på knappen.
10.	Hele benken beveges ned	Benken går jevnt ned ved å trykke på knappen.
11.	Strømindikator	Håndkontrolleren er koblet til strømforsyningen på riktig måte, indikatorlampene lyser. Ellers vil den ikke lyse.
12.	Reset-knapp	Benken vil stilles tilbake til startposisjon.
13.	Indikator for varmfunksjon	Trykk på knappen, lyset er på, varmfunksjon fungerer; trykk på knappen igjen, lyset skruer seg av, varmfunksjonen skrus av.
14.	Varme	

Olivia

Art.nr: 1002275

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	204x81x72kg

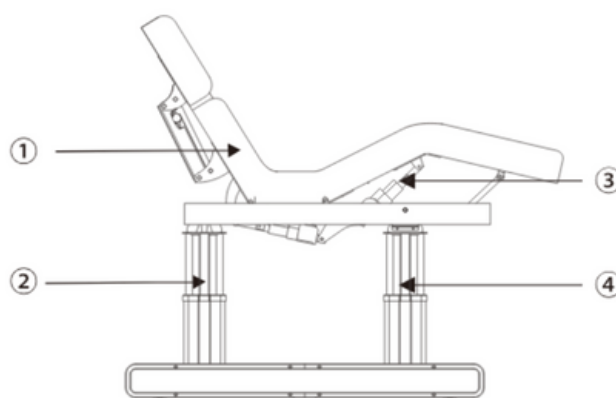

1. vinkeljustering av ryggstøtten
2. hevejustering av hele sengen
3. vinkeljustering av setet
4. hevejustering av hele sengen

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).