

# Julio

Art.nr: 1002244a

Elektrisk pedikyrbenk med splitt i bena.  
Benken har tre motorer som justerer høyde, tilt og rygg. Fotenden justeres ved hjelp av en hydragisk pumpe.

Denne benken går ekstra høyd. Fotdel er justerbar i benkens lengde. Armlener er avtakbare.

**Motorer:** 3

**Styres:** Innebygde knapper

**Split:** 90°

**Tilt:** 10°

**Bredde:** 56 - 80 cm

**Lengde:** 191 cm

**Høyde:** 58 - 100 cm (+20 cm ved tilt)

**N.W:** 88 kg

**G.W:** 105 kg


**Emballasje:** 172x62x72cm

**Tillegg:**

Håndkontroll

Fotkontroll


Benkepapirholder

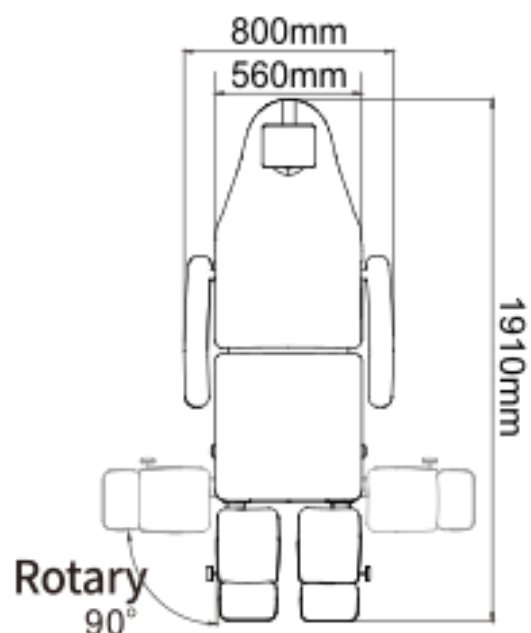



# Julio

Art.nr: 1002244a

## Standard konfigurasjon (vippebrytere)

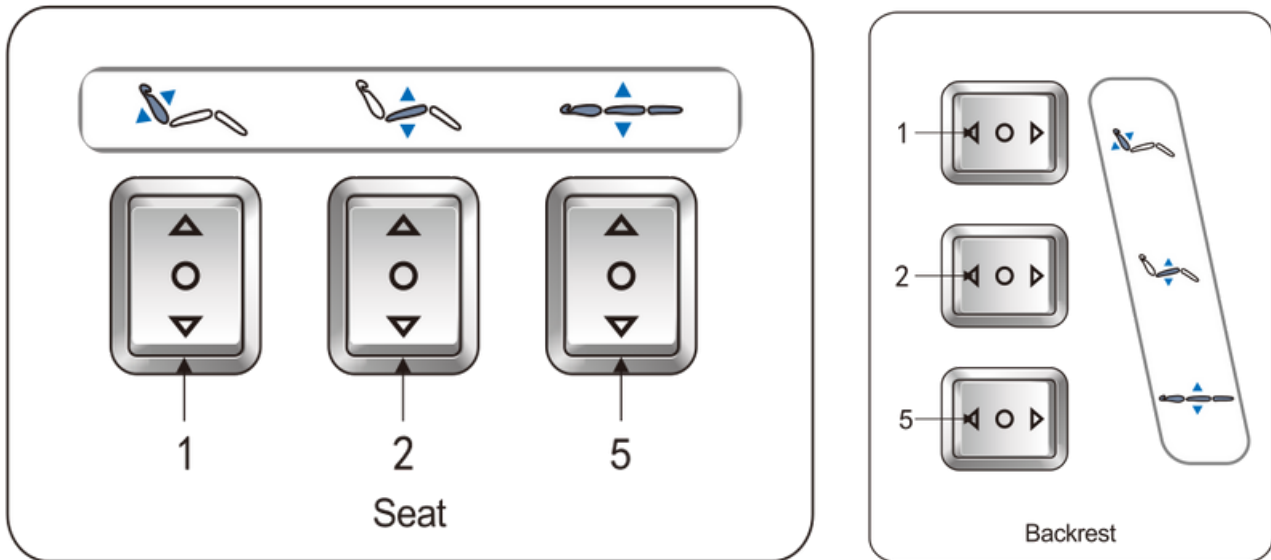

|    | Beskrivelse             | Funksjon                                                                                                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Justering av ryggstøtte | Trykk på knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet. |
| 2. | Justering av sete       | Trykk på knappen opp (ned), setet lener seg bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).           |
| 5. | Knapp for høydekontroll | Trykk på knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.         |

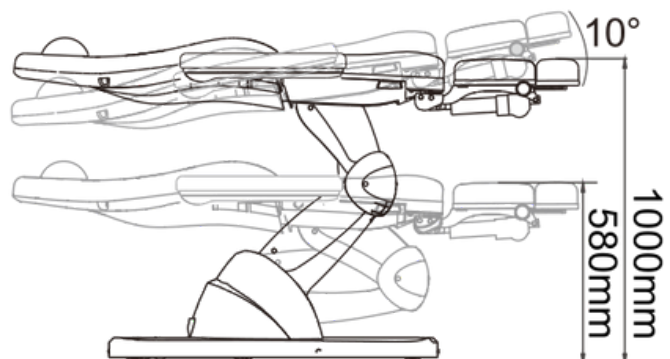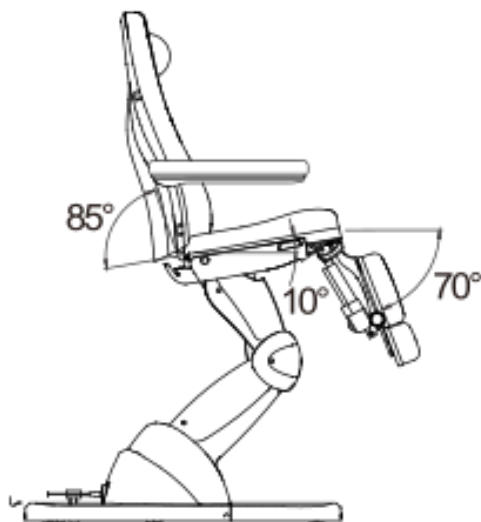

# Julio

Art.nr: 1002244a

## Tekniske parametere

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Støm                  | AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz |
| Maksimal effekt       | 300W                                |
| Omgivelsestemperatur  | 0°C-40°C                            |
| Relativ luftfuktighet | 30%-90%                             |
| Løftekapasitet        | 175kg                               |
| Pakkestørrelse        | 172x62x72cm                         |



1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevingsjustering av hele sengen
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten (venstre-manuell)
5. Vinkeljustering av fotstøtten (høyre-manuell)

### Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales **ikke**.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).