

Kajsa

Art.nr: 1002246B

Elektrisk behandlingsbenk med 4 motorer, som gjør benken justerbar i høyde, tilt, fotende og rygg. Benken kan roteres, og har en egen Reset-knapp.

Motorer: 4

Styres: Innebygde knapper

Roterbar: $-120^{\circ} \sim 120^{\circ}$

Tilt: 15°

Lengde: 186 cm

Høyde: 62-94 cm

Bredde: 56-86 cm

Maksvekt: 175kg

N.W: 80kg



G.W: 95kg

Emballasje: 136x82x70 cm

Tillegg:

Fotkontroll


Benkenapirholder

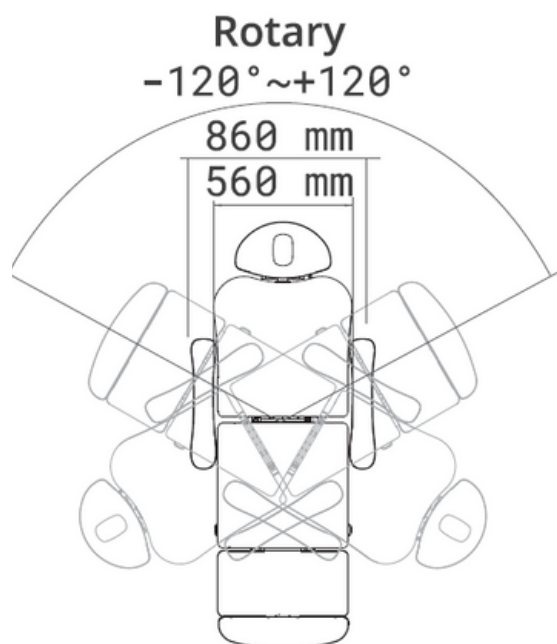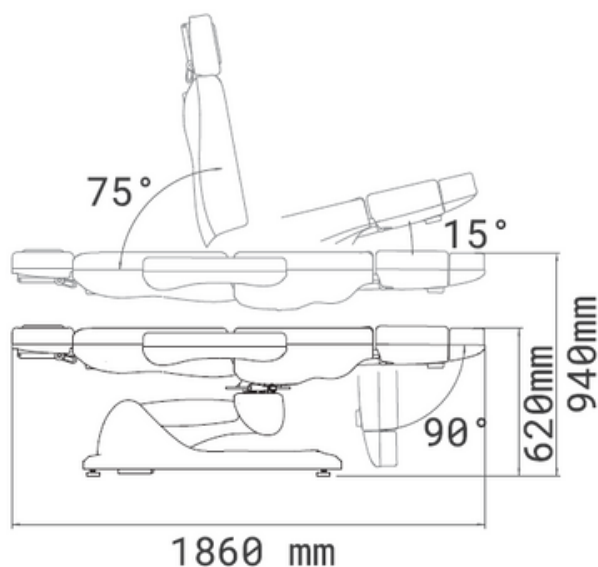

Kajsa

Art.nr: 1002246B

Standard konfigurasjon (vippebryter)

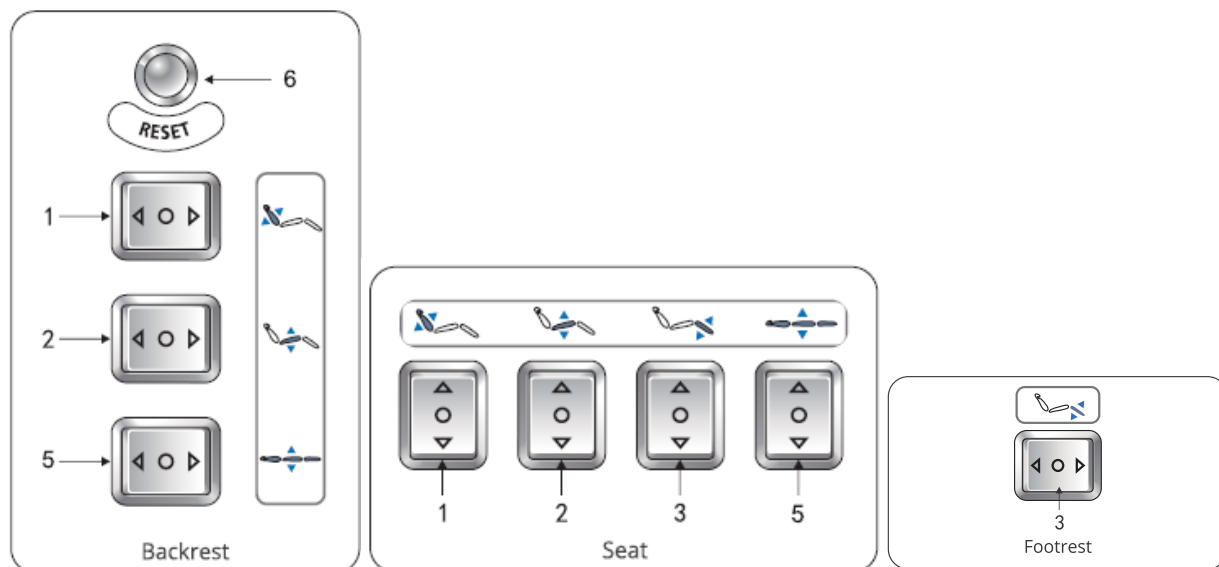


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk på knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for justering av sete	Trykk på knappen opp (ned), setet lener seg bakover (beveger seg tilbake til horisontal stilling).
3.	Knapp for justering av fotstøtte (høyre)	Trykk på knappen opp (ned), høyre fotstøtte beveger seg opp (ned), vinkelen reduseres (øker) med jevn hastighet.
5.	Knapp for høydejustering	Trykk på knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.
	Reset-knapp	Trykk på knappen, ryggstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, seteputens vinkel vil automatisk reduseres til minimum, fotstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, produktets høyde vil automatisk nå den laveste posisjonen.


Kajsa

Art.nr: 1002246B

Stramming av hodestøtte

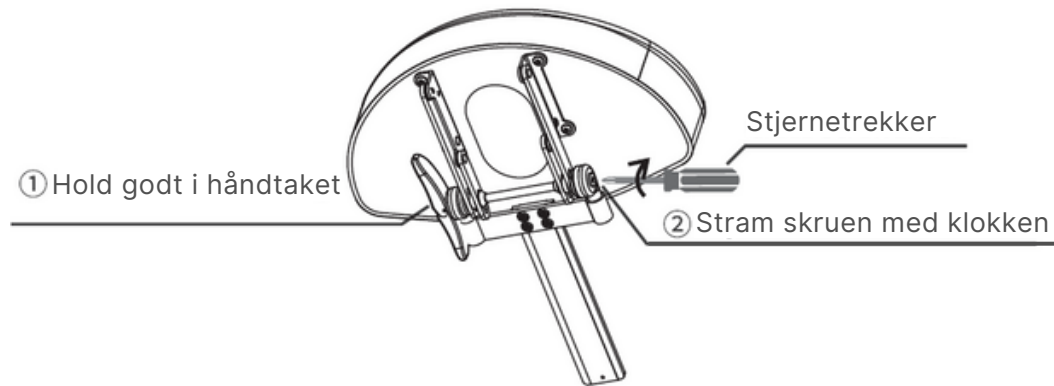

Ikke tilt behandlingsbenken når den er på sitt laveste punkt.

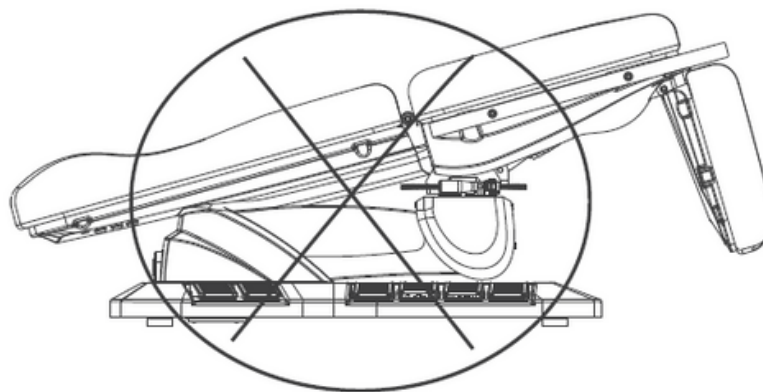


Kajsa

Art.nr: 1002246B


Instruksjoner for å stramme bremsekloss

(Dette er for å stramme bremseklossen der tannhjulet er slitt)

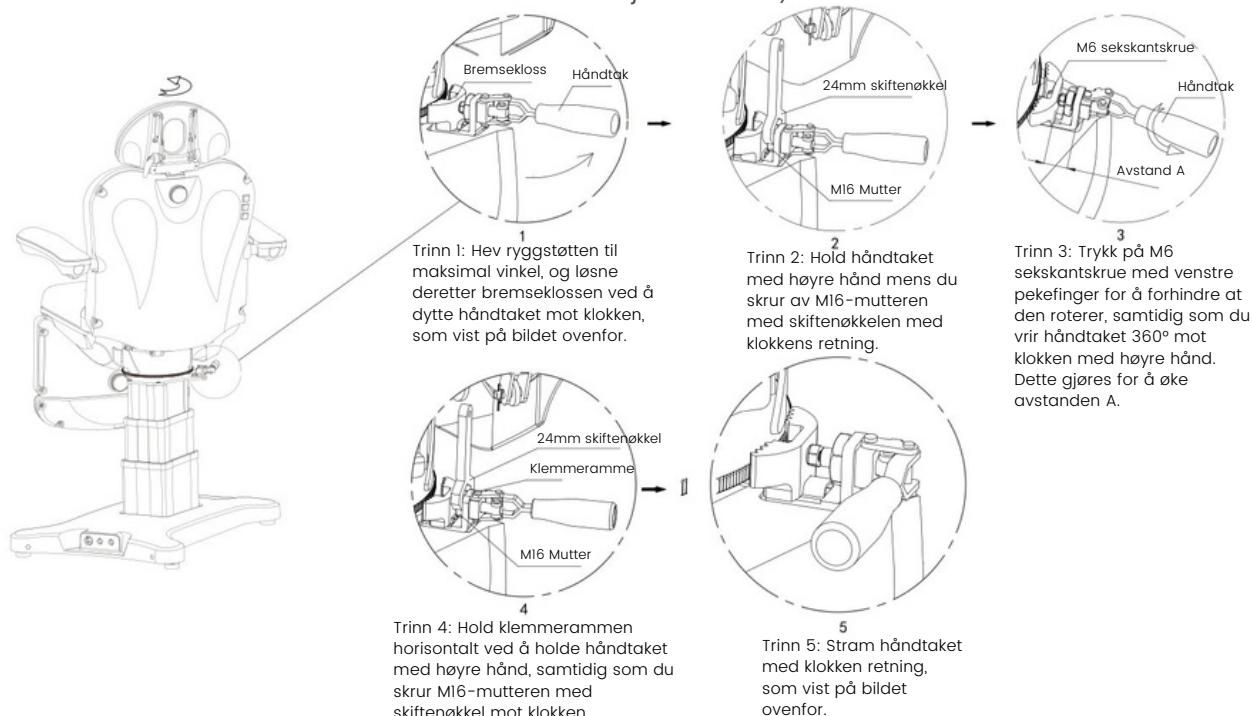

Instruksjoner for å bytte ut bremseklossen

(Dette er for å erstatte bremseklossen hvis tannhjulet på bremseskoen er fullstendig utslitt og den ikke fungerer lenger.)

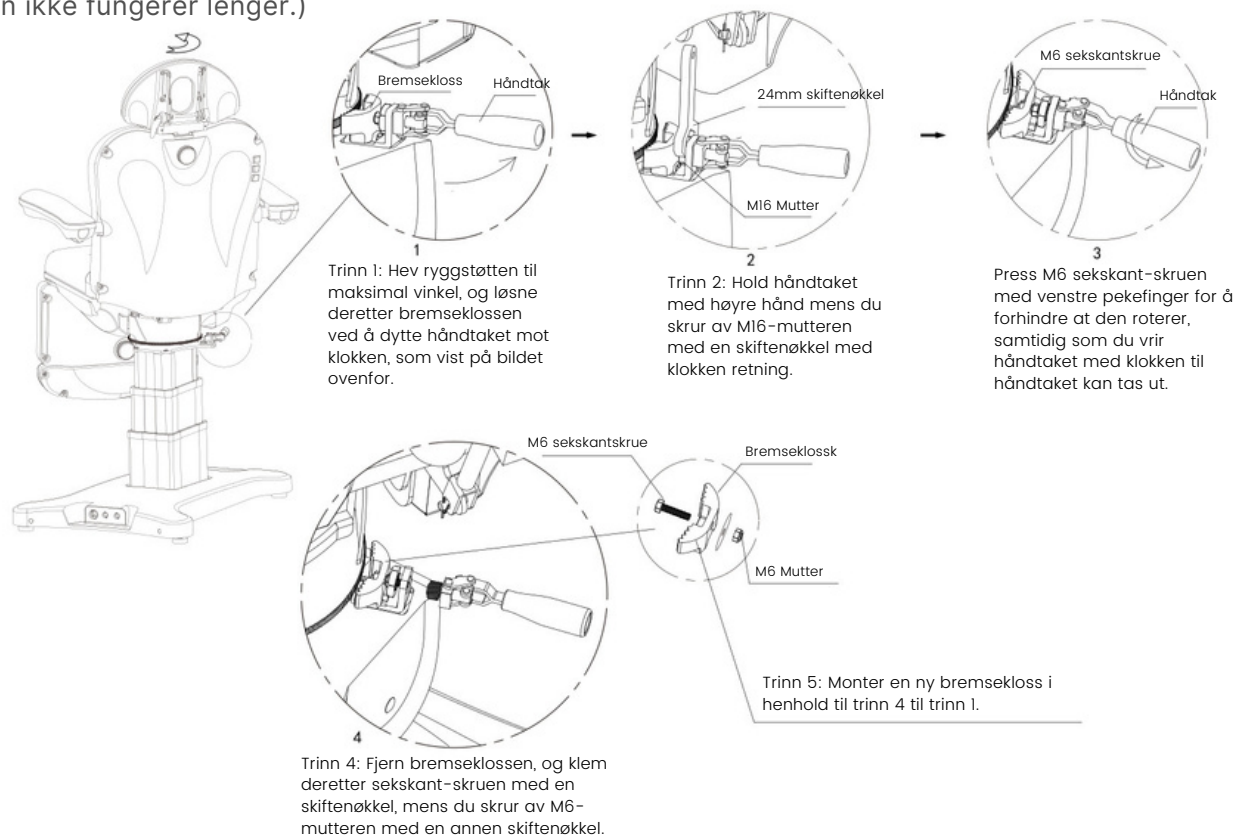


Denne produktgrafikken er kun for visning. For den spesifikke produktstrukturen, vennligst se på det faktiske produktet.

Kajsa

Art.nr: 1002246B

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	136x82x72cm

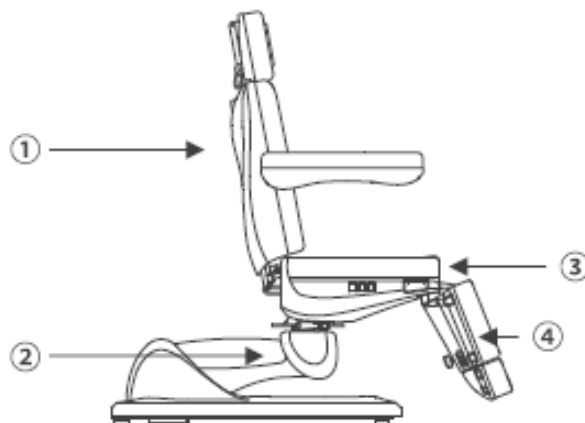

1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevejustering
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).