

Noor

Art.nr: 1002246C

Elektrisk behandlingsbenk med 5 motorer som styrer høyde, tilt, rygg og fotdel. Benken kommer med splitt. Hodedel og fotdel er justerbar i benkens lengde. Stolen kan roteres, og kommer med reset-knapp.

Motorer: 5

Styres: Innebygde knapper

Roterbar: 120°

Tilt: 15°

Lengde: 186 cm

Høyde: 58-88 cm

Bredde: 56-86 cm

Maksvekt: 175kg



N.W: 79kg

G.W: 92kg



Emballasje: 143x82x70cm

Tillegg:

Benkepapirholder

Håndkontroll


Fotkontroll

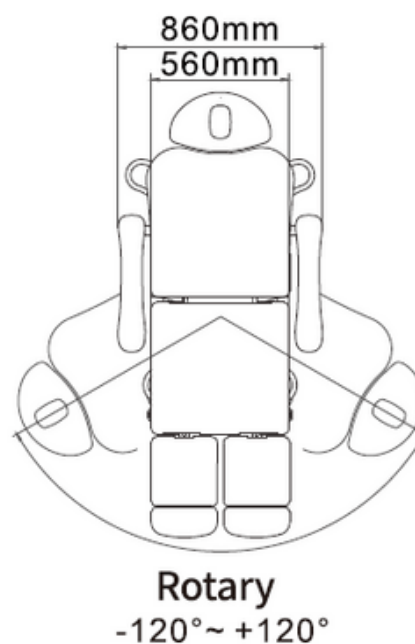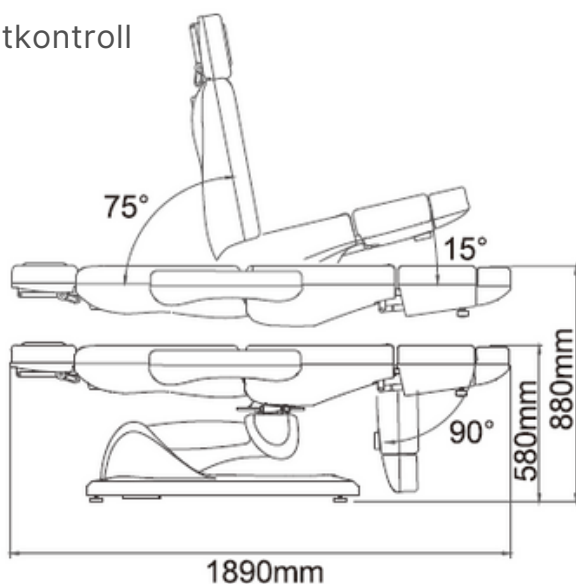

Noor

Art.nr: 1002246C

Standard konfigurasjon (vippebrytere)

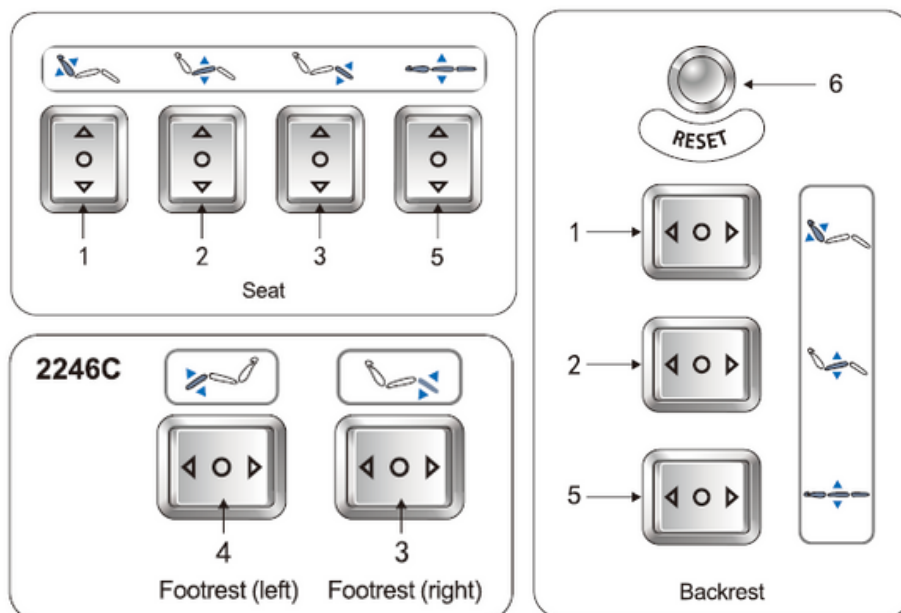


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Justering av ryggstøtte	Trykk på knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg oppover (nedover).
2.	Justering av sete	Trykk på knappen opp (ned), setet lener seg bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Justering av fotstøtte (Høyre)	Trykk på knappen opp (ned), høyre fotstøtte beveger seg oppover (nedover).
4.	Justering av fotstøtte (Venstre)	Trykk på knappen opp (ned), venstre fotstøtte beveger seg oppover (nedover).
5.	Justering av høyde	Trykk på knappen opp (ned), hele sengen beveger seg oppover (nedover).
5.	Reset-knapp	Trykk på knappen, ryggstøtten vil automatisk bevege seg opp til maksimum, seteputevinkelen vil automatisk bevege seg til flatt, høyde vil automatisk nå laveste posisjon.


Noor

Art.nr: 1002246C

Stramming av hodestøtte

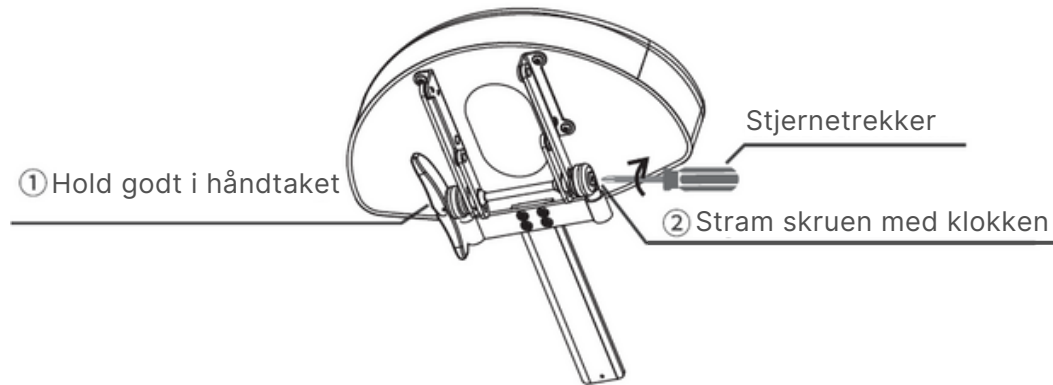

Ikke tilt setet når behandlingsbenken er på sitt laveste punkt.

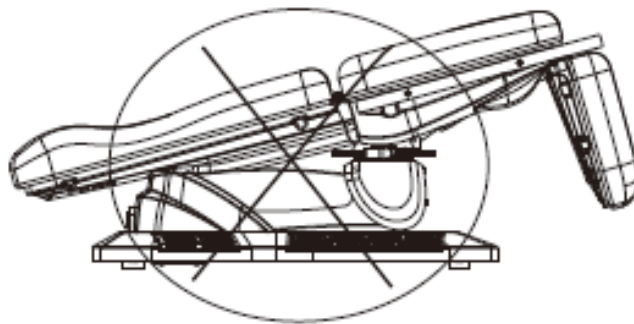


Noor

Art.nr: 1002246C


Instruksjoner for å stramme bremsekloss

(Dette er for å stramme bremseklossen der tannhjulet er slitt)

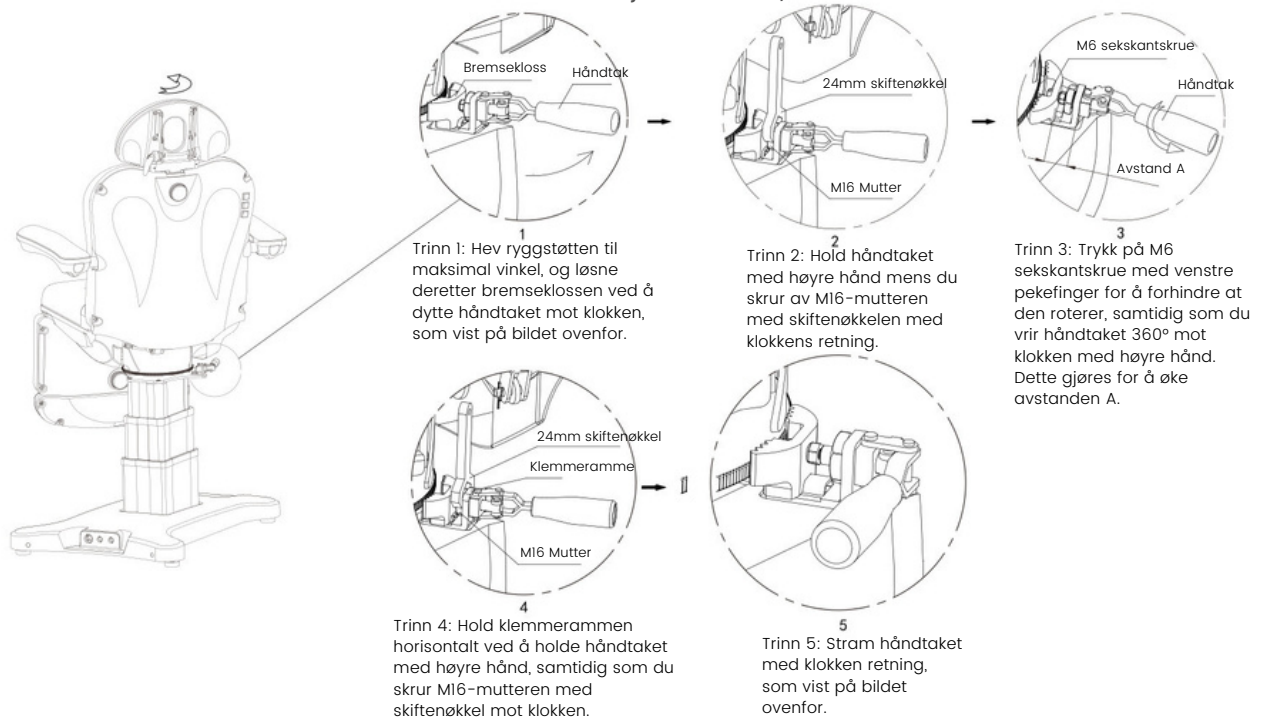

Instruksjoner for å bytte ut bremseklossen

(Dette er for å erstatte bremseklossen hvis tannhjulet på bremseskoen er fullstendig utslitt og den ikke fungerer lenger.)

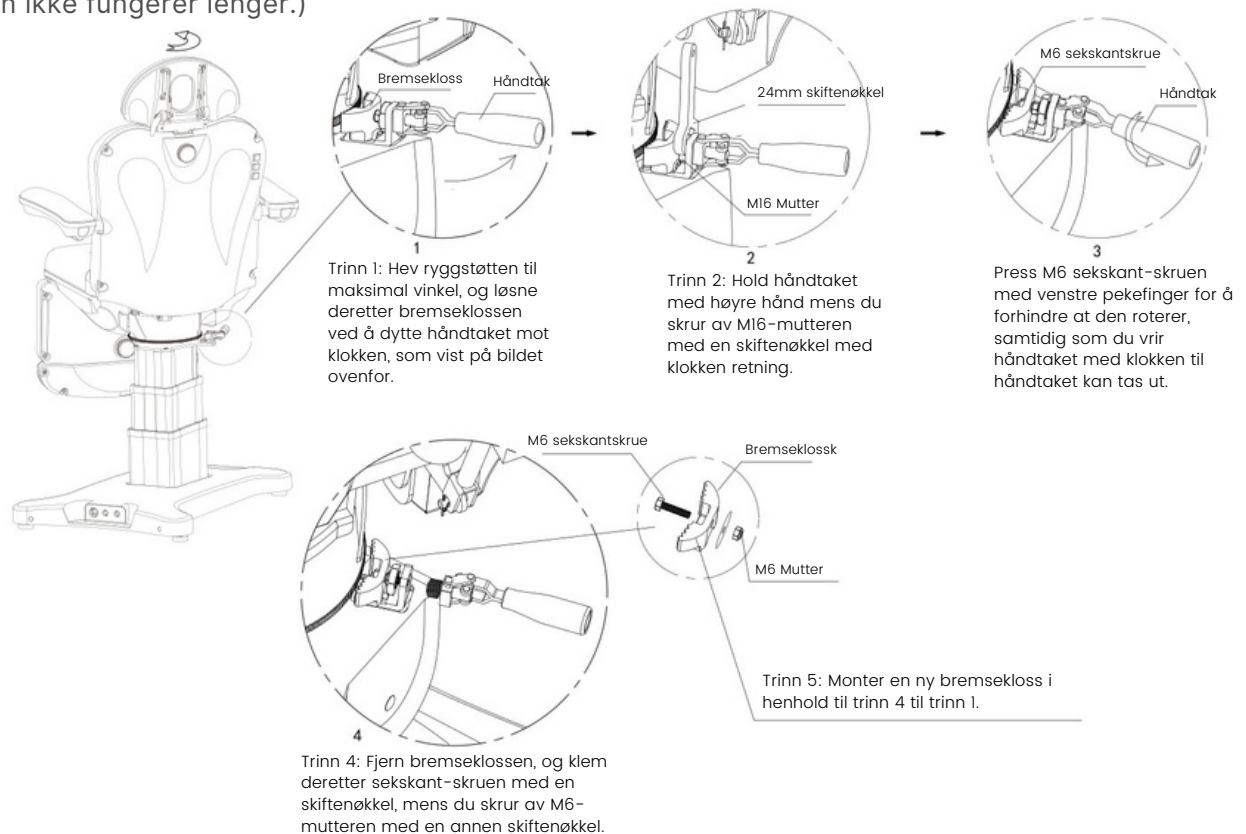


Denne produktgrafikken er kun for visning. For den spesifikke produktstrukturen, vennligst se på det faktiske produktet.

Noor

Art.nr: 1002246C

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	143x82x70cm

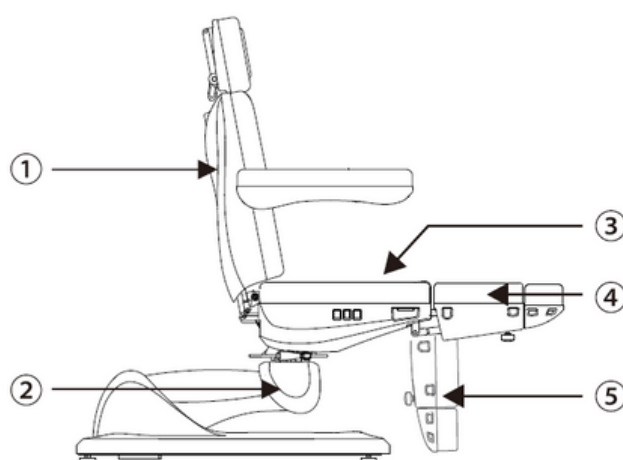

1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevejustering av hele sengen
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten (høyre)
5. Vinkeljustering av fotstøtten (venstre)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).