

# Ronda behandlingsbenk

Art.nr: 1002235B

Elektrisk behandlingsbenk med tre motorer som justerer høyde, tilt og rygg. Benken kan etterjusteres i beina ved hjelp av en hydraulisk pumpe.

Individuell justerbar nakkestøtte og fotstøtte, og avtagbare armlener. Benken justeres ved hjelp av knapper på baksiden og på siden av benken.

**Motorer:** 3

**Styres:** Innebygde knapper

**Lengde:** 184 cm

**Høyde:** 59 - 88 cm

**Bredde:** 58 - 85 cm (bredde med armlene)

**Maksvekt:** 175kg

**N.W.:** 88kg

**G.W.:** 100kg



**Emballasje:** 148x72x64cm

**Tillegg:**

Håndkontroll

Fotkontroll

Benkepapirholder

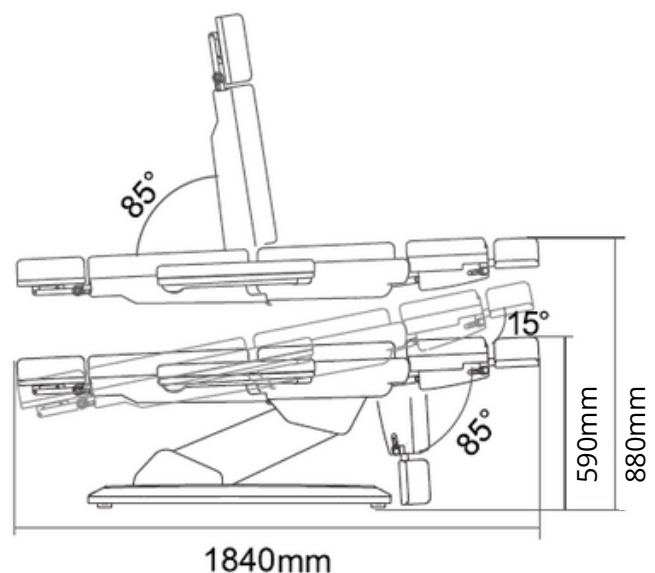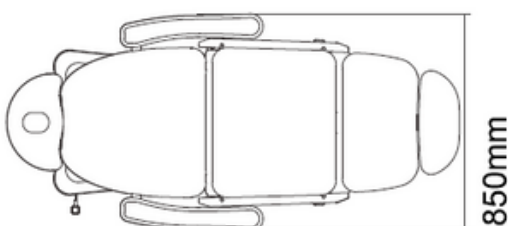

# Ronda behandlingsbenk


Art.nr: 1002235B

## Standard konfigurasjon (vippebryter)



	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for setejustering	Trykk knappen opp (ned), setet vipper bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Knapp for høydejustering	Trykk knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.
4.	Knapp for justering av fotstøtte	Trykk knappen opp (ned), fotstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen reduseres (øker) med jevn hastighet.
5.	Reset-knapp	Trykk på knappen, ryggstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, seteputens vinkel vil automatisk reduseres til minimum, fotstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, produktets høyde vil automatisk nå den laveste posisjonen.

## Stramming av hodestøtte

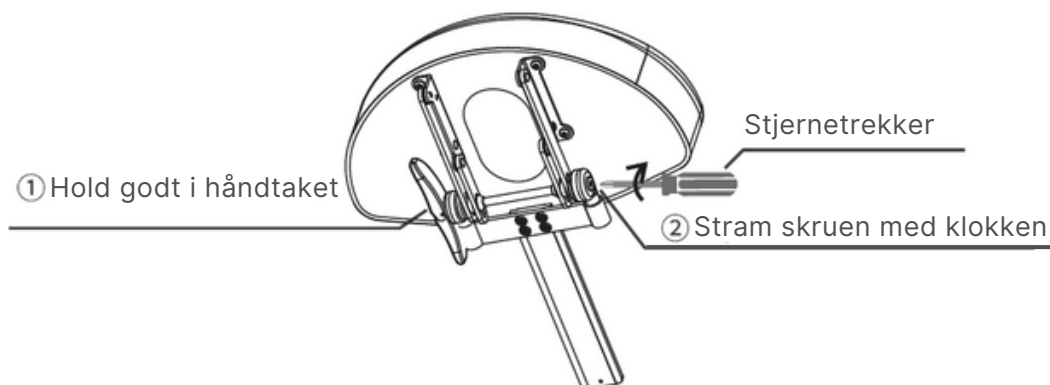


# Ronda behandlingsbenk

Art.nr: 1002235B

## Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	148x72x64

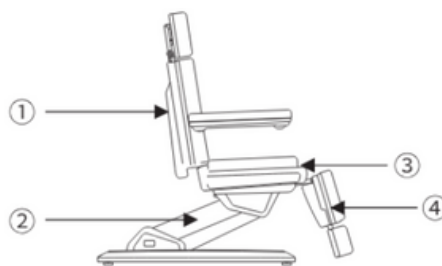

1. justering av ryggstøttens vinkel
2. hevejustering av hele sengen
3. justering av setets vinkel
4. justering av fotstøttens vinkel

### Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).