

Cosmobil

Art.nr: 1002201A

Manuell behandlingsbenk.

Benken kan justeres i rygg og fotdel, med manuelle spaker som dyttes opp/eller ned.

Robust design, som er enkel å rengjøre.

Hodeputen er avtakbar, og under finnes utgang til pustehull om kunden ligger på magen. Hodedelen kan vippes opp 45° og fotdel kan vippes ned 45°.

Lengde: 183 cm

Bredde: 83 cm

Høyde: 75 cm

Maksvekt: 175 kg



Materiale: PU

N.W: 30kg

G.W: 34kg

Emballasje: 137x30x66cm


Tillegg: benkepapirholder

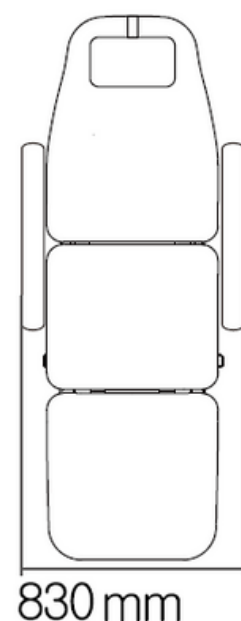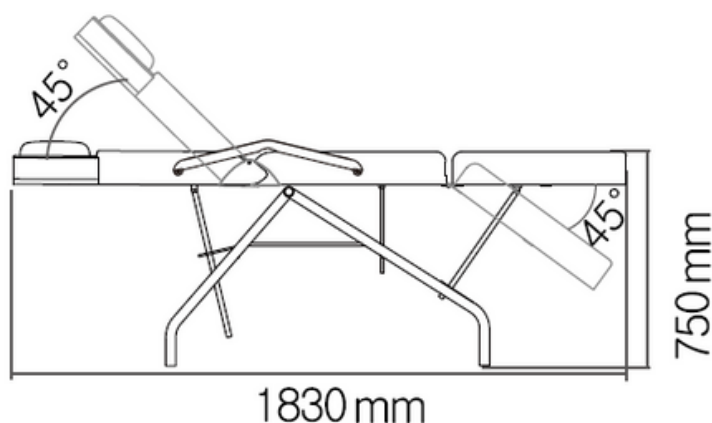


Cosmobil

Art.nr: 1002201A

Installasjonsprosedyre:

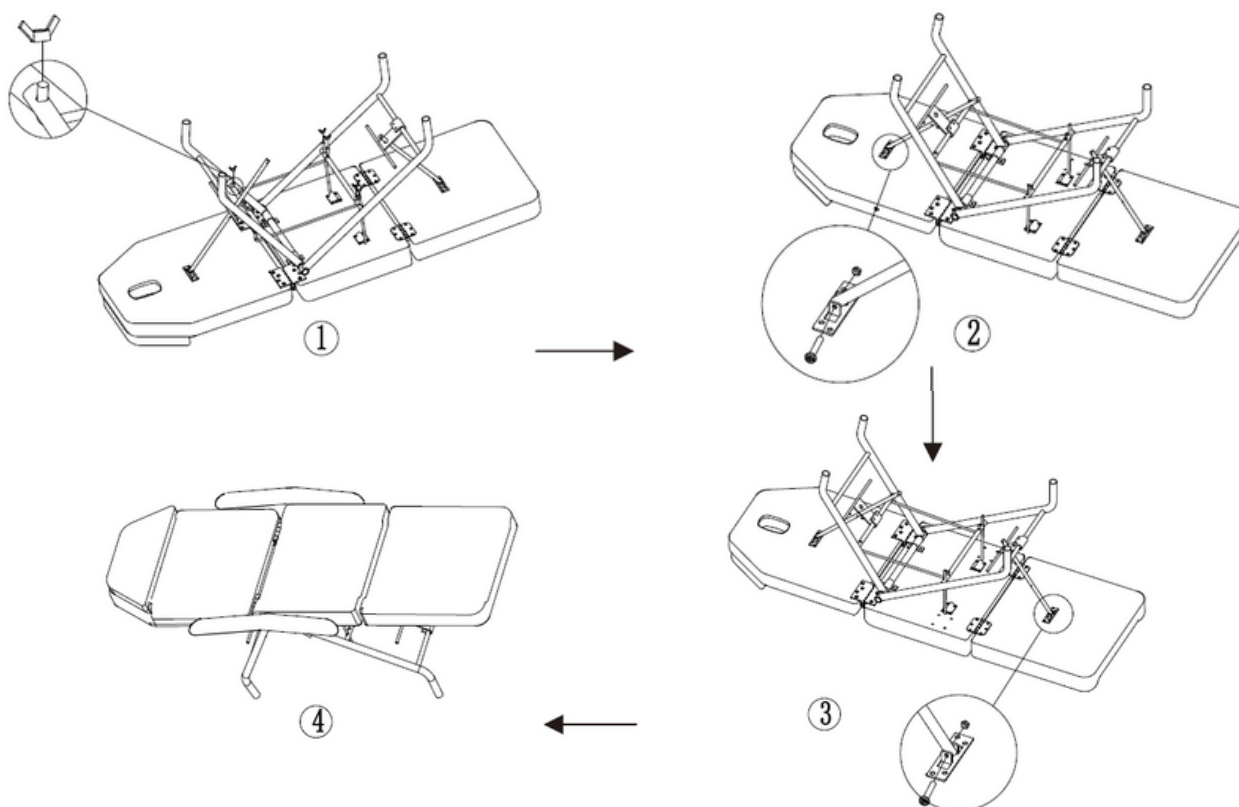

Installer armlener som vist nedenfor:

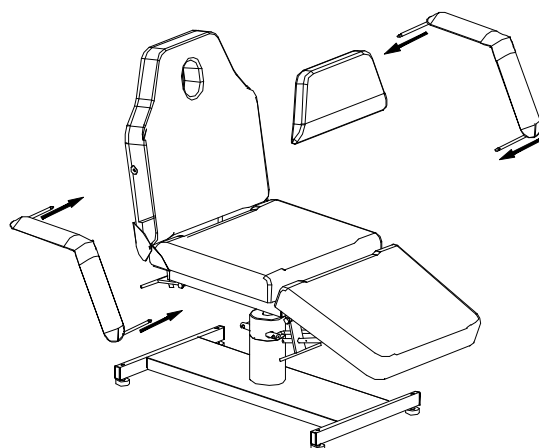

- 1.Tråkk lett på fotpedalen for å heve hele sengen. Tråkk hardt og jevnt på fotpedalen for å senke hele sengen
- 2.Dra pedalen til høyeste posisjon for å låse sengen.

Cosmobil

Art.nr: 1002201A



Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).