

Nora

Art.nr: 1002246a

Elektrisk behandlingsbenk med splitt i bena. Benken har tre motorer som justerer høyde, tilt og rygg. Beina justeres ved hjelp av en hydraulisk pumpe. Benken er roterbar i 120° begge veier

Motorer: 3

Styres: Innebygde knapper

Split: 85°

Rotasjon: -120°~+120°

Lengde: 189 cm

Høyde: 63 - 93cm (115 cm fotende med tilt)



Bredde: 59 - 82 cm (bredde med armlene)

Maksvekt: 175kg

N.W: 79kg

G.W: 92kg


Emballasje: 136x82x70cm

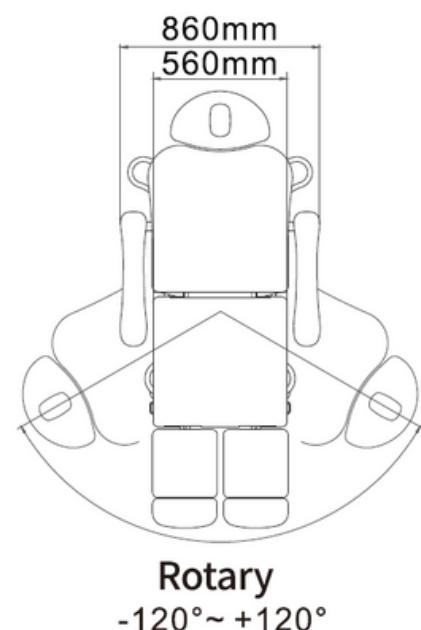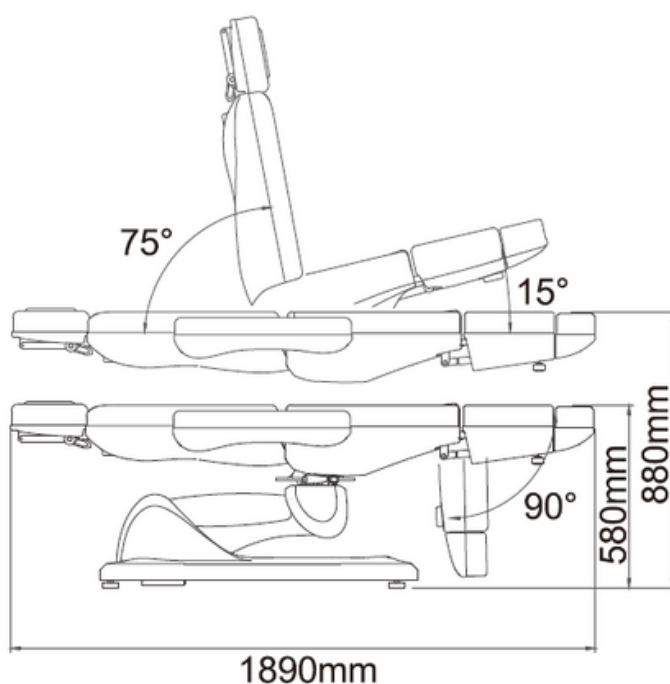

Nora


Art.nr: 1002246a

Standard konfigurasjon (vippebrytere)

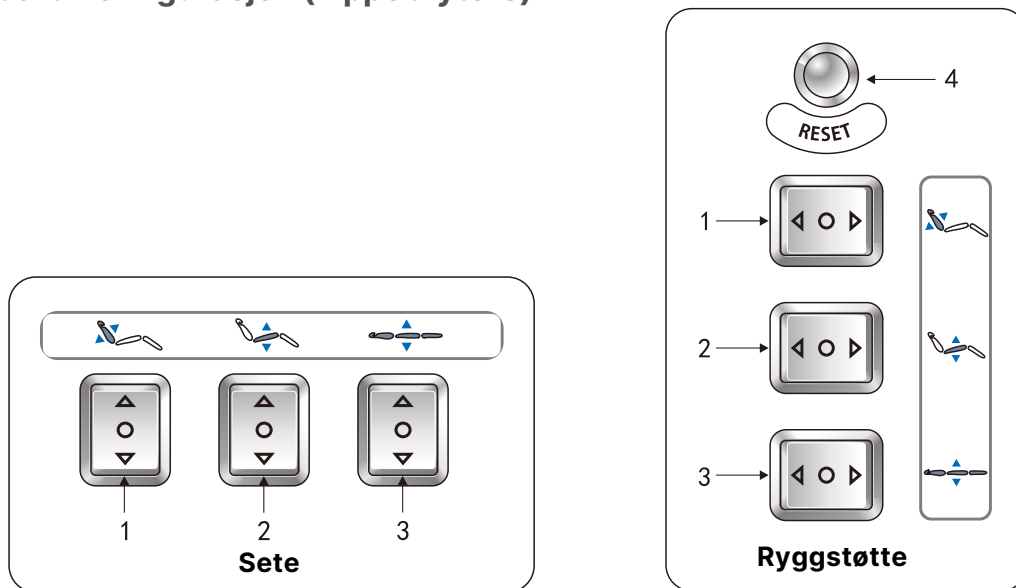

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk på knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for setejustering	Trykk på knappen opp (ned), setet heller bakover (beveger seg tilbake til horisontal stilling).
3.	Knapp for høydekontroll	Trykk på knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.
4.	Reset-knapp	Trykk på knappen, ryggstøtten vil automatisk bevege seg opp til maksimum, seteputevinkelen vil automatisk bevege seg til flat stilling, fotstøtten vil bevege seg ned til minimum, sengens høyde vil automatisk nå laveste posisjon.

Stramming av hodestøtte

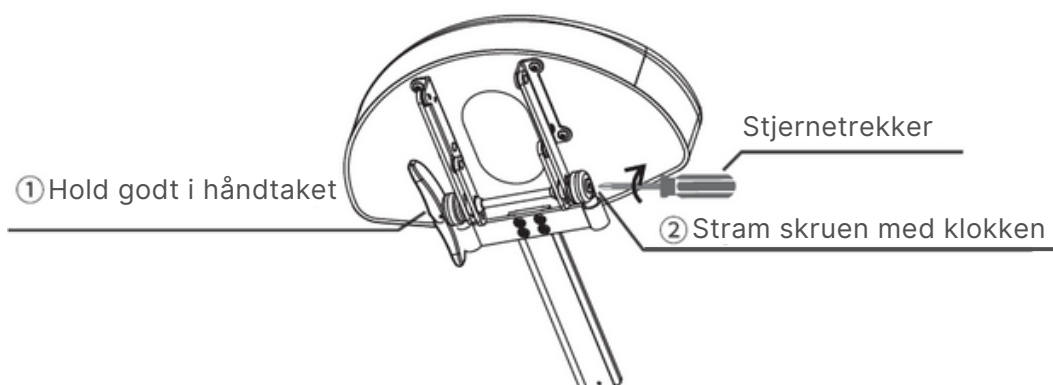


Nora

Art.nr: 1002246a


Instruksjoner for å stramme bremsekloss

(Dette er for å stramme bremseklossen der tannhjulet er slitt)

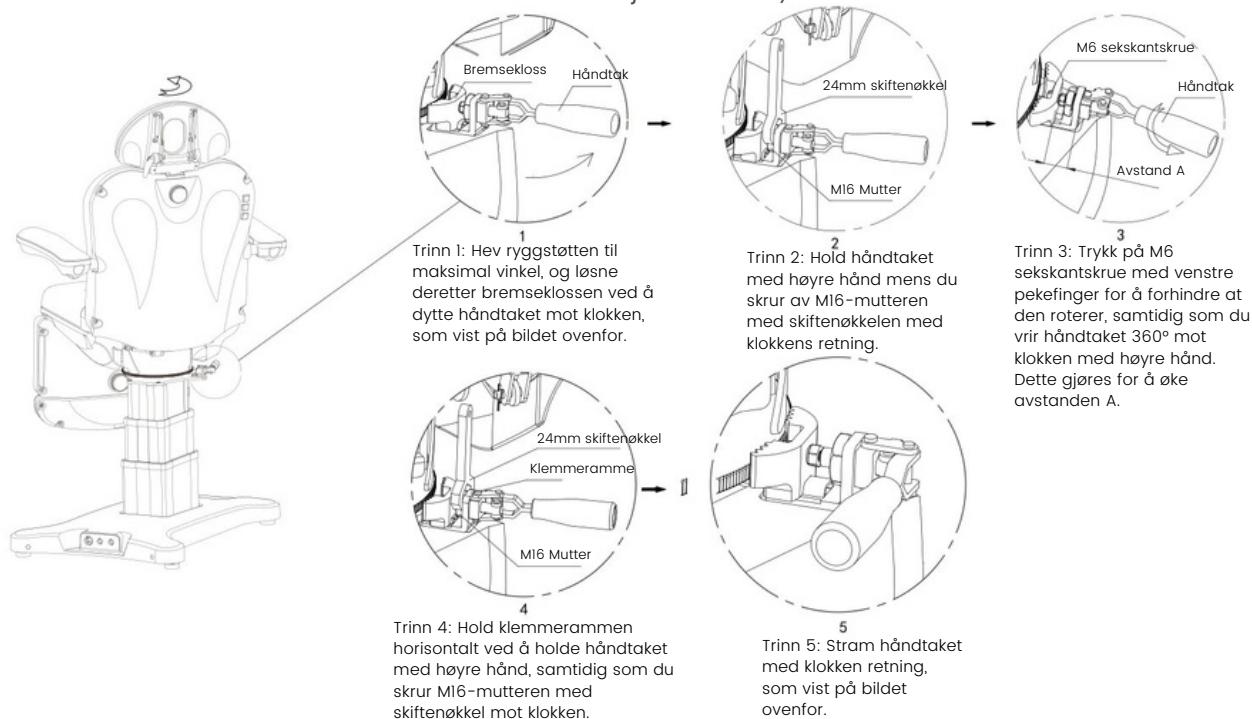

Instruksjoner for å bytte ut bremseklossen

(Dette er for å erstatte bremseklossen hvis tannhjulet på bremseskoen er fullstendig utslitt og den ikke fungerer lenger.)

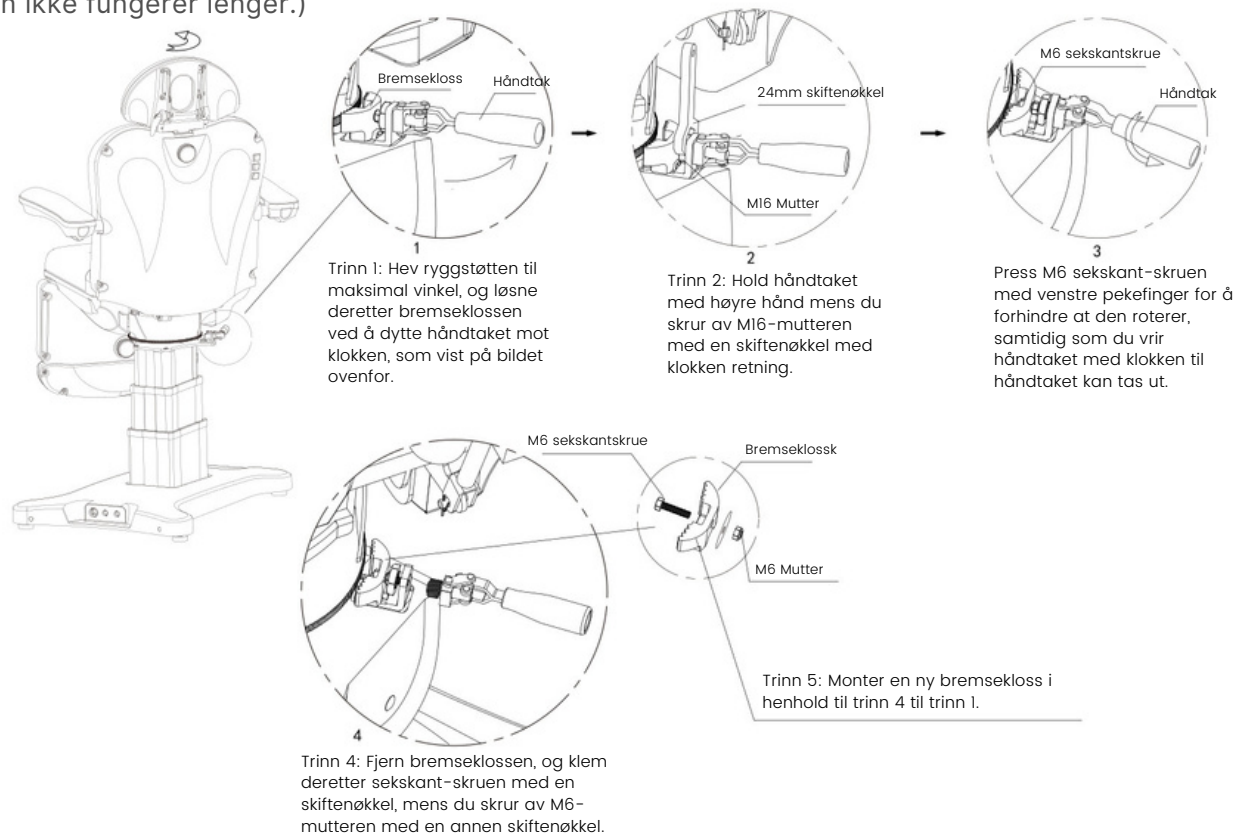


Denne produktgrafikken er kun for visning. For den spesifikke produktstrukturen, vennligst se på det faktiske produktet.

Nora

Art.nr: 1002246a

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	136x82x70cm

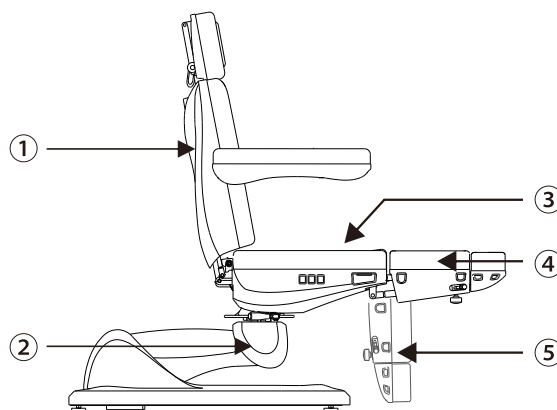

1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevejustering av hele sengen
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten (høyre) (manuell justering)
5. Vinkeljustering av fotstøtten (venstre) (manuell justering)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).