



Spray & vakum Digital

Art.nr: 100F-316b

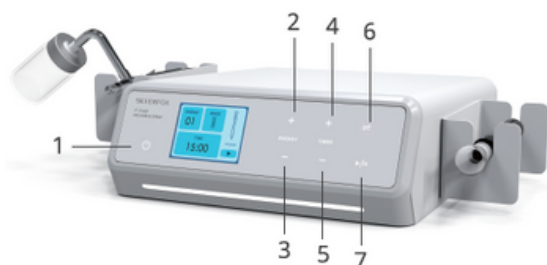

- 1.Strømbryter
- 2.Øke strømstyrke +
- 3.Minke strømstyrke -
- 4.Øke tid +
- 5.Minske tid -
- 6.Modusbryter
- 7.Start/Pause

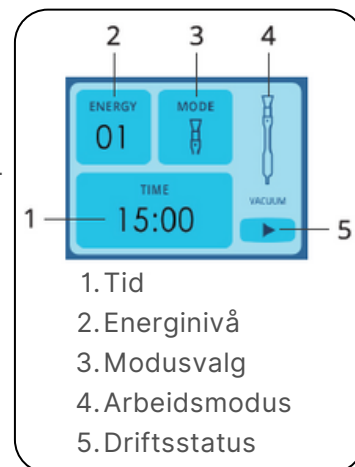

Fremgangsmåte

1. Sett inn luftslangen i hovedenhetens luftslangeinngang. Når utstyret er koblet til strømkabelen korrekt, lyser "strømbryteren" rødt. Trykk på "strømbryteren" for å gå inn i arbeidsmodus, og det vil vises på skjermen. Utstyret er satt i standardmodus; energinivå 1 satt til 15 minutter.
2. Trykk på modusbryteren for å velge et passende modus basert på behovet ditt; modusen kan være innstilt som vakuum eller spray. Hvis du velger vakuum, må du velge en egnet glasskolbe.
3. Trykk på "Øke/ reduser tid-knappen", som lar deg sette arbeidstiden fra 1-30 minutter.
4. Trykk på "Start/Pause"-knappen for å starte programmet. Strømstyrke er justerbar, fra nivå 1 til 10.
5. Når du vil at utstyret skal stoppe arbeidet under bruk, kan du trykke på "Pause"-knappen.
6. Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen er ferdig, og "strømbryteren" vil lyse rødt på dette tidspunktet. Rengjør sprayinstrumentet, vakuumpennen og glasskolben med 75 % alkohol, etter at strømkontakten er trukket ut, og oppbevar det på et tørt sted.
7. Anbefalt brukstid: Ikke mer enn 10 minutter for vakuum eller spray.

Advarsel:

1. Ikke bruk vakuum i nærheten av øyet.
2. Ikke bruk ved allergier;
3. Brannskader, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår.

Spray & vakum Digital

Art.nr: 100F-316b

Vær oppmerksom

1. Hvis maskinen ikke suger når du starter er dette normal. Vent noen sekunder, og maskinen vil fungere som normalt.
2. Sjekk at glasskolben før hver bruk. Glasskolben skal ikke ha sprekker eller være knust i behandling.
3. Ikke la glasskolben være på samme område for lenge. Beveg kolben rundt på hudens overflate for å unngå skade.
4. Påse at munnstykket er ordenlig montert, for å unngå at hudpleieprodukter går inn i pumpen og ødelegger maskinen.
5. Skru av maskinen etter endt bruk.

Tekniske parametere

Produktmodell	F-316B
Strøm	AC 100-240V, 50/60Hz
Watt	65w
Produktstørrelse	20.8x23x7.5 cm
Pakkestørrelse	37x27.5x14 cm
Pakkeinnhold	Hovedenhet x 1
	Tilbehørshylle x 1
	Håndtak vakuumpenne x 1
	Flat munn glasskolbe x 1
	Rund munn glasskolbe x 1
	Skarpt munn glasskolbe x 1
	Instrumenttilbehør x 1
	Strømkabel x 1