


# Ultralyd digital

Art.nr: 100F-312b



1. Strømbryter
2. Økning av strømenergi +
3. Reduksjon av strømenergi -
4. Økning av tid +
5. Reduksjon av tid -
6. Modusbryter
7. Start/Pause

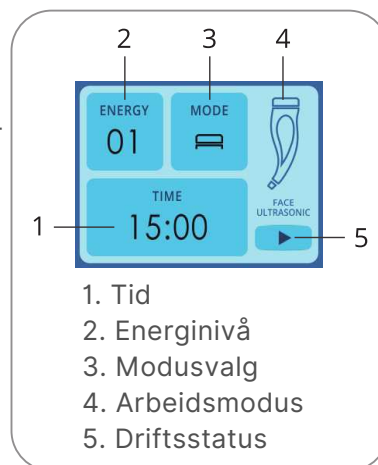

1. Tid
2. Energinivå
3. Modusvalg
4. Arbeidsmodus
5. Driftsstatus

## Fremgangsmåte

1. Sett den ultralydproben inn i kontakten på maskinen. Når utstyret er riktig tilkoblet strømkabelen, vises "Strømbryteren" i rødt. Trykk på "Strømbryteren" for å gå inn i arbeidsmodus, og den vil vises i hvitt på skjermen. Utstyret er forhåndsinnstilt til å passe øyeprogen; derfor er energinivået for nivå 1 satt til 15 minutter.
2. Forskjellige modus kan velges basert på behovet ditt. Trykk på "Modusbryteren" for å velge riktig modus, som er positiv, negativ og blandet utgangsmodus.
3. Trykk på "Tidsøkning/-reduksjonsknappen" som lar deg justere arbeidstiden fra 1-30 minutter.
4. Trykk på "Start"/"Pause"-knappen for å starte behandlinegn. Energienivået kan justeres og settes fra nivå 1 til 10.
5. Når du ønsker at den ultralydproben skal stoppe under behandlingen, kan du trykke på "Pause"-knappen.
6. Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen er avsluttet, og "strømbryteren" vil vise rødt på dette tidspunktet. Rengjør ultralydproben med 75% alkohol etter at strømpluggen er trukket ut, og oppbevar den på et tørt sted.
7. Anbefalt brukstid: Juster tiden i henhold til hudens tykkelse, vanligvis bør behandlingstiden ikke overstige 15 minutter.

Advarsel: Ikke la metallpartiet på proben komme i kontakt med vann

# Ultralyd digital

Art.nr: 100F-312b

## Advarsel

- Ikke rett proben direkte mot øyeeplet, berør øyet eller masser øvre øyelokk.
- Behandlingen frarådes ved:
  - 1.Graviditet og hjerteproblemer;
  - 2.Pasienter med svulster og alvorlige hjertesykdommer;
  - 3.Personer med hudforbrenninger, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår;
  - 4.Allergipasienter og personer med kontakteksem.
- Ikke fjern den rustfrie stålproben og håndtaket selv. Hvis du vrir den rustfrie stålproben og håndtaket, kan proben bli skadet.

## Merknad

- Før behandling er det nødvendig å påføre tilstrekkelig med kontaktgele på behandlingsområdet for å sikre at det er et god kontakt mellom proben og huden, for å unngå å strekke huden for mye.
- Ved bruk skal proben være nær huden for å forhindre kavitasjon og skade på huden.
- Hvis proben blir for varm kan den brenne huden, så brukstiden bør ikke overstige 15 minutter. Personer med sensitiv hud bør redusere brukstiden og energiintensiteten. Å forlenge brukstiden vil ikke forbedre pleieeffekten, men kan heller føre til fare. Det er viktig å være oppmerksom på at oppholdstiden for pleie av et hudområde ikke bør overstige 5 sekunder.
- Etter pleie vil huden vise en kortvarig erytem, på grunn av vibrasjonen fra proben og varmeproduksjonen, som øker blodsirkulasjonen. Dette er en normal tilstand.

# Ultralyd digital

Art.nr: 100F-312b

## Tekniske parametere

Produktmodell	F-312B
Strøm	AC 100-240V, 50/60Hz
Watt	11w
Produktstørrelse	20.8x23x7.5 cm
Pakkestørrelse	37x27.5x14 cm
Pakkeinnhold	Hovedenhet x 1
	Tilbehørshylle x 2
	Rustfri stål ultralydprobe tip x 1
	Rustfri stål ultralydprobe flat x 1
	Strømkabel x 1