

Elsa behandlingsbenk

Art.nr: 1002235D

Elektrisk behandlingsbenk med 4 motorer, som gjør benken justerbar i høyde, tilt, fotende og rygg.

Benken har også en egen Reset-knapp.

Motorer: 4

Styres: Innebygde knapper

Tilt: 15°

Bredde: 85 cm (bredde med armlene)

Lengde: 184 cm

Høyde: 59-88 cm

Maksvekt: 175kg

N.W: 88 kg

G.W: 93 kg


Emballasje: 148x72x64 cm

Tillegg:

Håndkontroll

Fotkontroll


Benkepapirholder

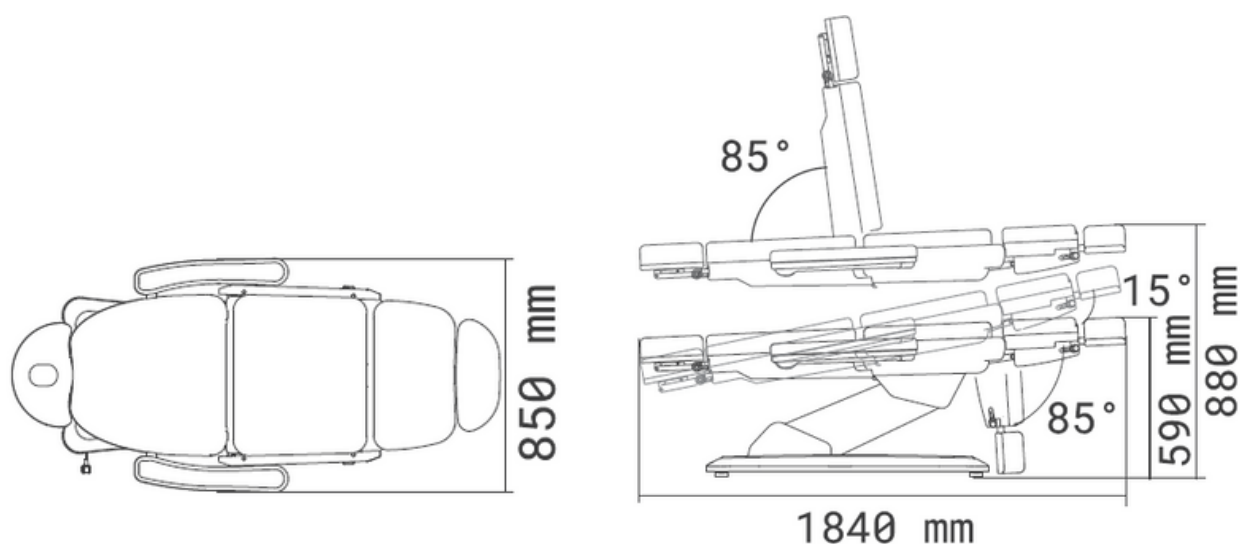

Elsa behandlingsbenk

Art.nr: 1002235D

Stramming av hode støtte

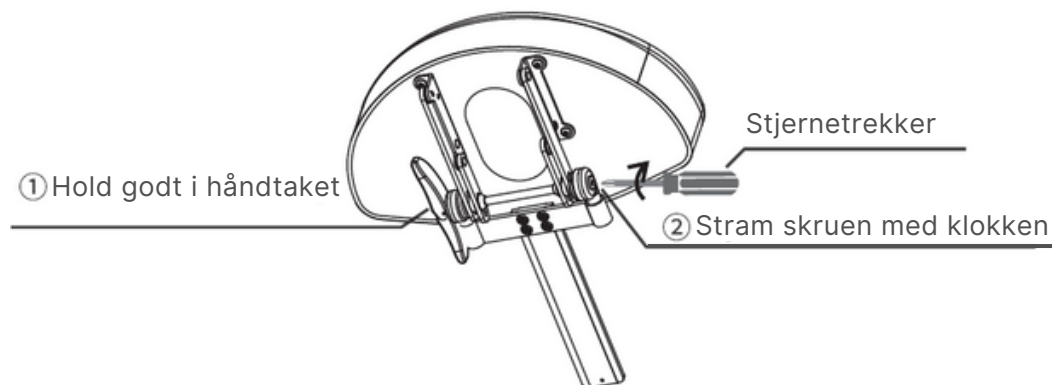

Standard konfigurasjon (vippebryter)




	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for setejustering	Trykk knappen opp (ned), setet vipper bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Knapp for høydejustering	Trykk knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.
4.	Knapp for justering av fotstøtte	Trykk knappen opp (ned), fotstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen reduseres (øker) med jevn hastighet.
5.	Enknapps nullstillingsknapp	Trykk på knappen, ryggstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, seteputens vinkel vil automatisk reduseres til minimum, fotstøttens vinkel vil automatisk bevege seg til maksimum, produktets høyde vil automatisk nå den laveste posisjonen.

Elsa behandlingsbenk

Art.nr: 1002235D

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	148x72x64cm

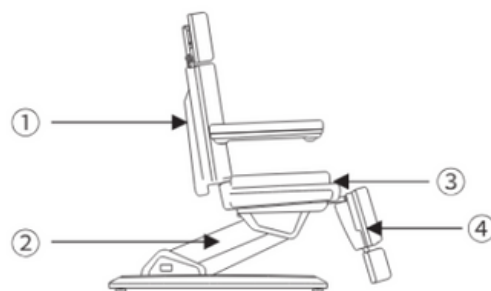

1. justering av ryggstøttens vinkel
2. hevejustering
3. justering av setets vinkel
4. justering av fotstøttens vinkel

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).