

Hudslipping kombi digitalt

Art.nr: 100F-360



Diamantslipping: Diamanthoder i ulike størrelse og grovhet som brukes i kombinasjon med vakuum for å utføre en slipeeffekt på huden. Diamanthodene velges ut i fra hvor i ansiktet du jobber, og hudtypen til kunden din. Maskinen medfølger med 2 håndstykker, 5 filter og 9 diamanthoder til diamantslipping.

Mikrokrystallslipping: Mikrokrystaller som roterer i kombinasjon med vakuum på hudens overflate og skaper slipeeffekten. Det følger med en pakke med rene krystaller som du bruker til krystallslipping.



Bilde 1



1. Hovedenhet
2. Flaske for mikrokrystalli avfallssand
3. Flaske for mikrokrystall ren sand
4. Diamantslippingpenn
5. Mikrokrystallpenn
6. Beholder for håndstykker
7. Hovedstrømbrytere
8. AC-strømforsyningskontakt (inkludert sikring)
9. Filter for diamantslipping
10. Filter for mikrokrystaller
11. Filter for kondensert mikrokrystallinsk vann

Hudslipping kombi digitalt

Art.nr: 100F-360




1. Mikrokrystallsliping

2. Diamantsliping

Bilde 2

Microkrystallsliping

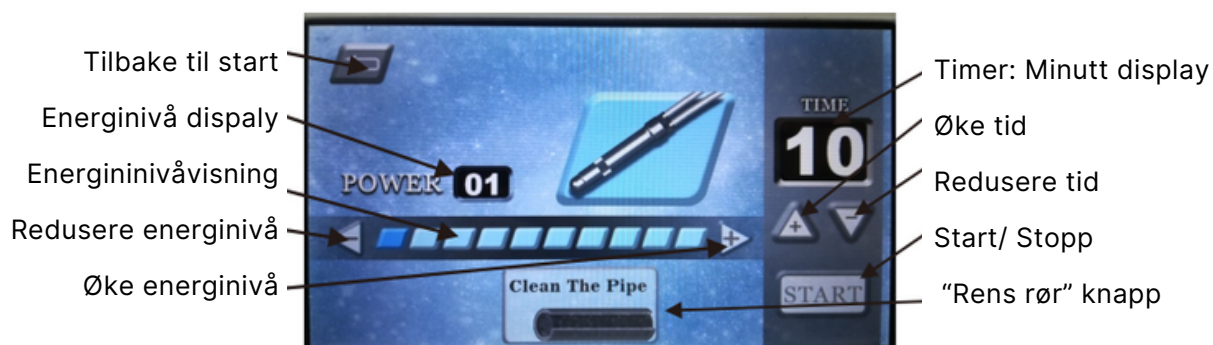

Bilde 3

Diamantsliping



Bilde 4

Hudsliping kombi digitalt

Art.nr: 100F-360

Vær oppmerksom:

Før behandling;

Analyser kundens hud, velg deretter behandling og juster passende lufttrykk.

Etter at huden er rensset, tørke av overflødige fuktighet før du starte behandlingen. Huden skal være helt tørr under behandlingen.

Ved behandling rundt øynene, sørg for at lufttrykket justeres til ca. 1~5.

Etter å ha fullført hudensliping, vennligst bruk vann for å rense ansiktet, påføre maske og avslutt med fuktighetskrem.

Etter behandling;

Beskytt huden med solkrem. Ikke bruk sminke før 4 timer etter avsluttet behandling. Vask ansiktet med kaldt vann. Ikke benytt badstue 10-15 dager etter behandling.

Vedlikehold:

Rengjøring av diamantslipehode

Etter bruk av diamantslipehodet, bruk vann for å rengjøre hodet og den indre delen av sugehodet med en liten børste. Etter å ha vasket den mekanisk skal den steriliseres i varmluftssterilisator eller autoklav.


Rengjøring av mikrokrystallslipehode:

Fjern plasthetten, skyll den indre og ytre overflaten med vann og såpe, og bruk deretter en Q-tips med 75% alkohol for å desinfisere indre og ytre overflater (Ikke bruk høy temperatur eller UV-desinfeksjon).

Bruk en myk børste for å rengjøre mikrokrystaller som er sølt ut.

Daglig bruk og vedlikehold for filtre:

- 1.Fjern filteret
- 2.Trekk hele filteret sakte og horisontalt ut av instrumentet, som bildet viser.
- 3.Etter at filteret er trukket ut, dra sakte koppekslet fra filteret vertikalt nedover.

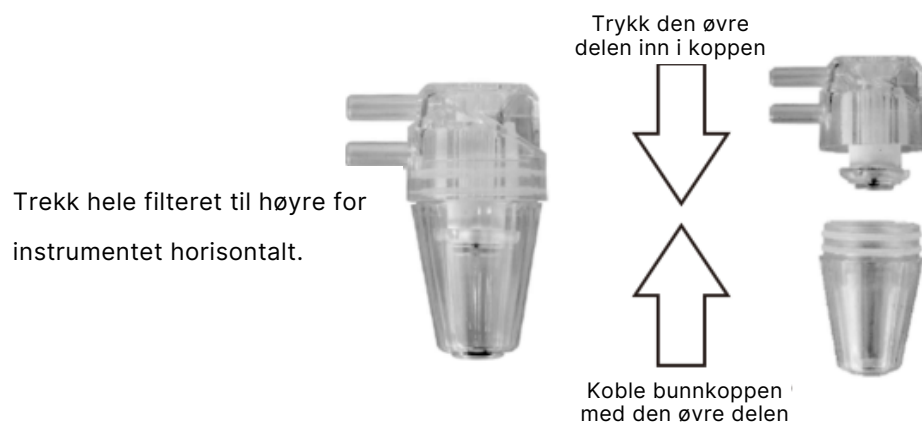

Bilde 5

Hudslipping kombi digitalt

Art.nr: 100F-360

4. Rengjør filteret

A. Hell ut vannet eller urenheter fra i koppen på filteret; Hvis rengjøring er nødvendig, kan filteret skylles under vann. Det er strengt forbudt å bruke etsende væske som alkohol. Luftttørk etter rengjøring, eller tørk av den med en tørr myk klut eller tørt papir.

5. Installer filteret

A. Filterinstallasjon: installer koppdekselet under filteret, og sørg for det er tetningsringen er intakt under installasjonen, for å unngå luftlekkasje. Vennligst referer til bildet nedenfor.

B) Installer filteret horisontalt og tilbake til den opprinnelige posisjonen for å sikre tettheten uten å etterlate noen glipper.

C) Se bilde 1. Når filtret skal installeres må mikrokrystal- og diamantfilteret være helt tørt.



Hvis den hvite tetningsringen går tapt eller ved eventuell luftlekkasje kan den ikkebrukes

Bilde 6

Produktparametere

Strøm	100V-240V 50Hz/60Hz
Effekt	145W
Pakkestørrelse	41.5×35.5×50cm
Nettovekt	11.6 kg ±5%
Bruttovekt	13.7 kg ±5%
Omgivelsestemperatur	0°C ~ +45°C
Lagrings-/transporttemperatur	-20°C ~ +60°C
Omgivelsesfuktighet	30%RH ~ 80%RH
Lagrings-/transportfuktighet	30%RH ~ 80%RH