

Muskelstimulator

Art.nr: 100F-905

Muskelstimulator for muskeltoning og slimming. Maskinen inneholder ulike program tilpasset ulike områder, og ønsket formål med behandlingen.

Spenning: 220V/50Hz


Tidsområde: 0~60 minutter

Vekt: 6,8 kg



Program:

- P1, P5: Muskelmassasje, lindring av muskelsmerter.
- P2, P6: Forbedre muskeltonus i bryst, midje, mage, rumpe, lår og ben.
- P3, P7: Simulerte kroppsøvelser for å forbedre blodet flyt og lymfedrenasje.
- P4, P8: Vekttapsprogram.

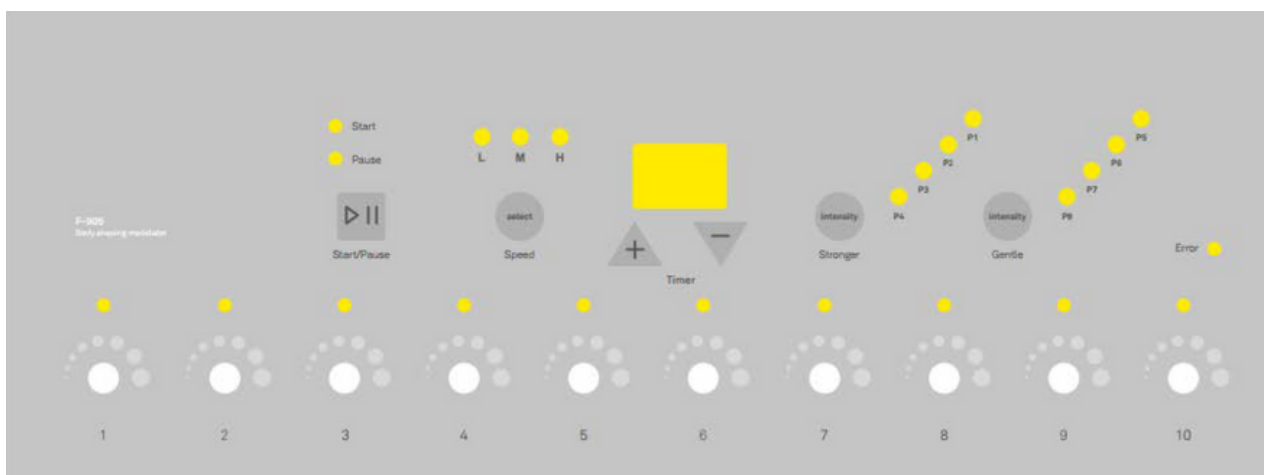

Muskelstimulator

Art.nr: 100F-905

Forberedelse:

- A. Snakk med kunden for å bekrefte behandlingsområde for å finne riktig program, og ta en detaljert registrering av kundens situasjon og forhold, for å kunne sammenligne ved neste behandling.
- B. Gi en behagelig massasje i 5-10 minutter på behandlingsområde, for å slappe av musklene før videre behandling.
- C. Etter massasje, tørk huden ren.
- D. Bruk det elastiske beltet for å feste elektrodene mot huden. Påfør kontaktgele under elektroden hvis du ikke får kontakt.
- E. Dobbeltsjekk om elektroden er i riktig posisjon, det elastiske beltet er godt strammet, og overflaten av elektroden klistrer seg til huden.

Drift:

Sørg for at alle utgangsknapper er tilbakestilt til "0" og slå deretter på hovedstrømbryteren.

- A. Konfigurer behandlingsprogram: I henhold til det valgte programmet, velg riktig program fra P1 - P8.
- B. Trykk ned start/pause-knappen, som er satt for å bytte instrumentets arbeidsstatus: Når "Arbeid" -lampen er på, starter mikrostrømutgangen; når "Stopp" -lampen er på, pauses mikrostrømutgangen. "Arbeid" -lampen er på som standardstatus.
- C. Konfigurer riktig strømstyrke (intensitet) og hastighet (frekvens) for utgangen: I henhold til reaksjonen til hver muskelpunkt, bruk knappen for strømstyrke; rask, middels, langsom for å finne passende styrke.
- D. Konfigurer behandlingstid: Instrumentets standardarbeidstid er satt til tretti minutter; bruk øk eller reduser knappen for ønsket tid.
- E. Hvis den innstilte tiden er ferdig, stoppes maskinen med en "alarm". På dette tidspunktet kan trinn B-E gjentas for neste behandlingsområde. Hvis du er ferdig settes alle knapper til "0" -posisjon, slå av instrumentet, trekk ut strømkontakten.
- F. Etter at behandlingen er ferdig, fjern den elastiske beltet og elektrodene fra kroppen; tørk huden ren med fuktig håndkle eller tørkepapir.
- G. Etter behandling, rengjør apparatet og tilbehøret.

Muskelstimulator

Art.nr: 100F-905

