


# Skin scrubber digital

Art.nr: 100F-311b



1. Strømbryter
2. Øke strømstyrke +
3. Minke strømstyrke -
4. Øke tid +
5. Minske tid -
6. Modusbryter
7. Start/Pause

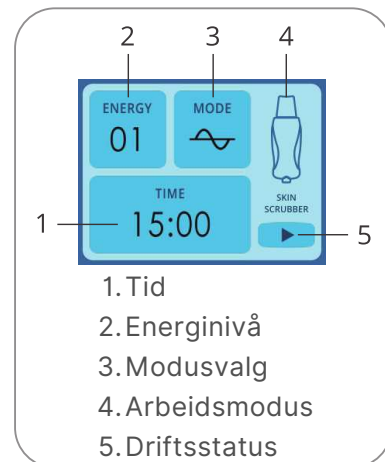

## Fremgangsmåte

1. Sett kontakten til spatelen og armbåndet inn i kontaktene på maskinent. Når utstyret er riktig tilkoblet strømkabelen, vises "Strømbryter" i rødt. Trykk på "Strømbryteren" for å gå inn i arbeidsmodus, og den vil vises i hvitt på skjermen. Utstyret er forhåndsinnstilt til kontinuerlig bølgeutgang; derfor er energiutgangen for nivå 1 satt til 15 minutter.
2. Forskjellige moduser kan velges basert på behovet ditt. Trykk på "Modusbryteren" for å velge riktig probe-utgangsmodus, som er kontinuerlig bølge, intermitterende bølge og blandet bølge.
3. Trykk på "Tidsøkning/-reduksjonsknappen", som lar deg justere arbeidstiden fra 1-30 minutter.
4. Sett på armbåndet på kundene før du trykker på "Start"/"Pause"-knappen for å starte operasjonen. Energienivået kan justeres og settes fra nivå 1 til 10.
5. Hvis armbåndet fjernes under behandlingen, vil utstyret stoppe å fungere automatisk.
6. Når du ønsker at utstyret skal stoppe under behandling, kan du trykke på "Pause"-knappen.
7. For å utføre dyprens fuktes huden med tonic. For innslusning må man ha olje eller gele som er ladet med ioner for å aktivere strømflyten.
8. Behandlingstiden bør ikke overstige 15 minutter med normal hudtilstand.
9. Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen er avsluttet, og "strømbryteren" vil vise rødt på dette tidspunktet.
10. Rengjør spatelen med 75% alkohol etter at strømpluggen er trukket ut, og oppbevar på et tørt sted.

# Skin scrubber digital

Art.nr: 100F-311b

## Brukes ved:

- Grov hud som trenger dypere rens
- Overproduksjon av talg (Rens)
- Fuktfattig hud (Innslus)
- Hud i ubalanse (Kombinert rens og innslus)
- Sliten hud, oppstramming og glød (Pulsring)

## Advarsel

- Ikke berør kontaktens inngang/utgang når maskinen er slått på.
- Ikke bruk i direkte i kontakt med øyet.
- Unngå bruk ved;
  - 1.Hudforbrenninger, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår.
  - 2.Hjertesykdom, smittsomme sykdommer, nevrotiske pasienter og personer med metall i kroppen under behandling.
- Holdt huden fuktig under behandling.
- Når du bruker skrubberen, vær oppmerksom på styrken og vinkelen på skrubberen i forhold til huden.
- Under arbeid, vær oppmerksom på forbindelsen mellom tilbehøret og maskinen. Ikke dra overdrevent, for å unngå at tilkoblingsfeil.
- Ikke bruk spatelen hvis spateloverflaten har deformasjoner eller feil, for å unngå skade på huden.

# Skin scrubber digital

Art.nr: 100F-311b

## Tekniske parametere

Produktmodell	F-311B
Strøm	AC 100-240V, 50/60Hz
Watt	10w
Produktstørrelse	20.8x23x7.5 cm
Pakkestørrelse	37x27.5x14 cm
Pakkeinnhold	Hovedenhet x 1
	Tilbehørshylle x 1
	Skrubber x 1
	Armebånd x1
	Strømkabel x 1

---

### Viktig!

- Hold skrubberen ren til enhver tid, og desinfiser den med 75 % alkohol etter hver bruk.
- Oppholdstiden for ett hudområde bør ikke overstige 5 sekunder